




we integrate. active.

Anleitung

Minspeak auf NuVoice/Accent

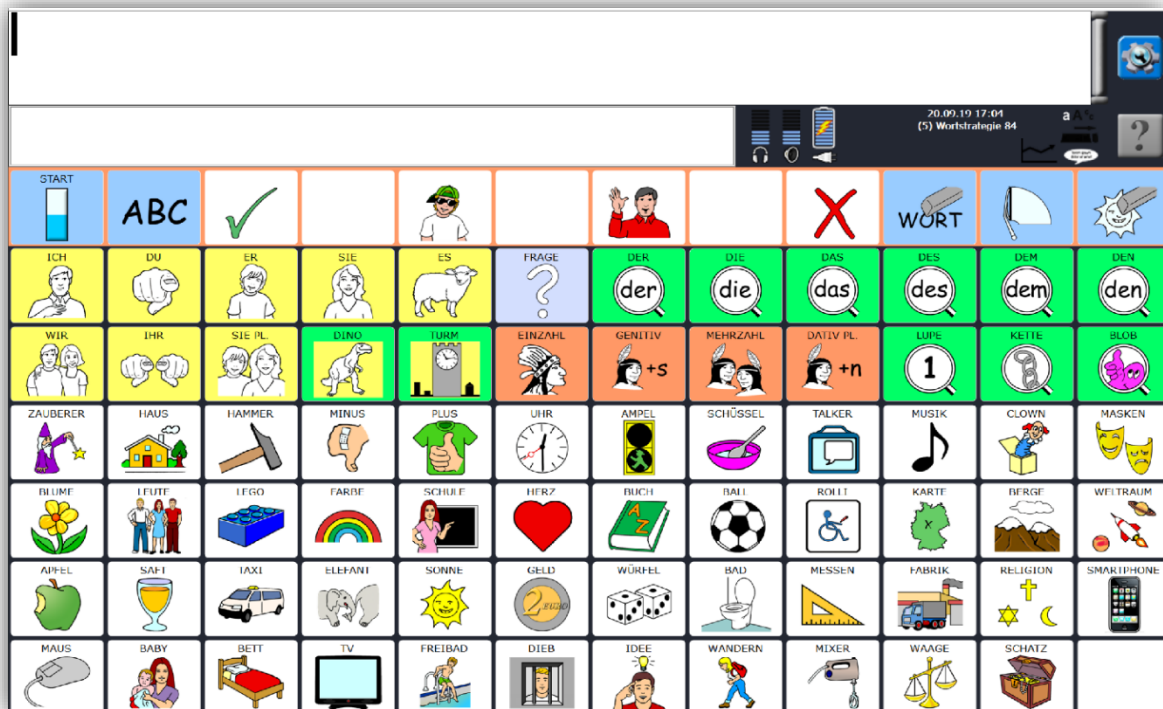



we integrate. active.

Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Kurzanleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1. Menü TOOLS.....	3
2. Feld bearbeiten via Setup-Taste.....	5
3. Bild ändern oder Foto einfügen.....	10
4. Neue Dialekte anlegen.....	11
5. Neuer Kern speichern.....	13
6. Mittleres Icon anpassen.....	18
7. Sprachausnahmen.....	19
8. Backup.....	21



we integrate. active.

Die Anleitung erklärt erste Schritte in der Programmierung der Software NuVoice auf der PC-Emulation oder auf dem Accent direkt mit dem Einsatz der Setup-Taste.

1. Menü TOOLS

1.1. Menü TOOLS öffnen




Gerätetaste TOOLS auf dem
Talkergehäuse drücken



oder

Taste auf dem Bildschirm drücken

In beiden Fällen erscheint anschliessend das Menü TOOLS mit dem Zugang zur Toolbox und der Setup-Taste:

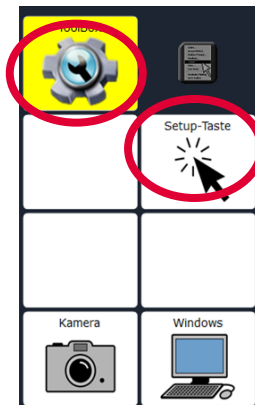



we integrate. active.

1.2. Toolbox öffnen

1.2.1. Im Menü TOOLS  drücken

1.2.2. Toolbox öffnet sich

MENÜ ANSAGEN	MENÜ ANSTEUERUNG	MENÜ AUSGABE	MENÜ AUSSPRACHE	SEITE ANLEGEN	SEITE AUSWAHLEN	SEITE ÄNDERN	SEITE LÖSCHEN	SEITE ANORDNEN
MENÜ DATEI VERWALTUNG	MENÜ DECKBLATT UND BENUTZER BEREICH	MENÜ EINSTELLUNGEN	MENÜ FEEDBACK	DIALEKTE ANLEGEN	DIALEKTE AUSWAHLEN	DIALEKTE ÄNDERN	DIALEKTE VERKNÜPFEN	WORT SUCHE
MENÜ INFRAROT	MENÜ KALENDER	MENÜ KAMERA	MENÜ MP3 PLAYER	KERNTASTE BELEGEN	KERNTASTEN ANORDNEN	KERN SPEICHERN	KERN LÖSCHEN	START
MENÜ NOTIZBUCH	MENÜ SPEICHER ÜBERTRAGUNG	MENÜ STIMME	MENÜ SYSTEM	LÖSCHE DISPLAY	LEISER	LAUTER	SPRACHE EIN/AUS	SCHRIFT MODUS
MENÜ UHR	MENÜ VOKABULAR KONTROLLE	MENÜ VOKABULAR MANAGEMENT	MENÜ WORTVORHERSAGE	STANDBY	KOPFHÖRER LEISER	KOPFHÖRER LAUTER	RECHNER	OK

Die Toolbox («Werkzeugkasten») ist eine Ebene der Talker-Software mit speziellen Funktionen zum Einstellen und Anpassen des Talkers, siehe Abschnitte 4, 5, 7 und 8 in dieser Kurzanleitung.

1.3. Setup-Taste

Mit der Setup-Taste können Felder des Vokabulars bearbeitet werden, wie im nachfolgenden Abschnitt 2 beschrieben.




we integrate. active.


2. Feld bearbeiten via Setup-Taste

2.1. Zur Seite navigieren, auf der eine Taste bearbeitet werden soll


2.2. Menü TOOLS öffnen

2.3. Setup-Taste  drücken

2.4. Zu bearbeitende Taste drücken

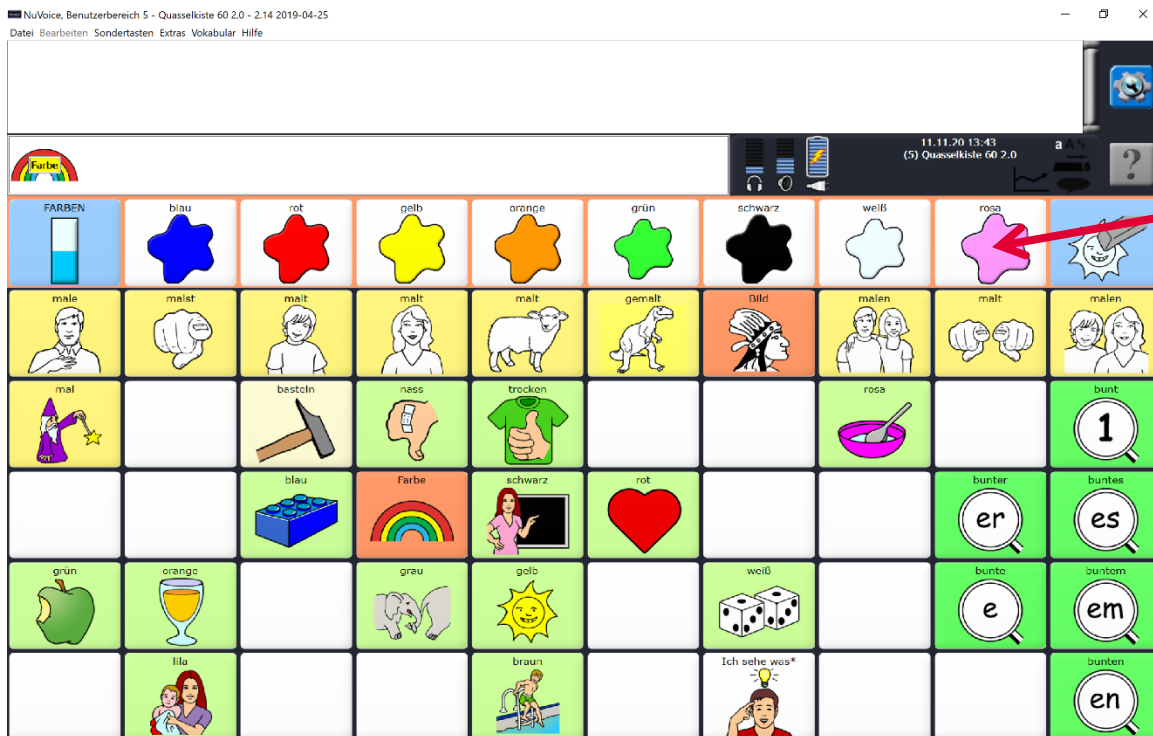

2.5. Taste bearbeiten

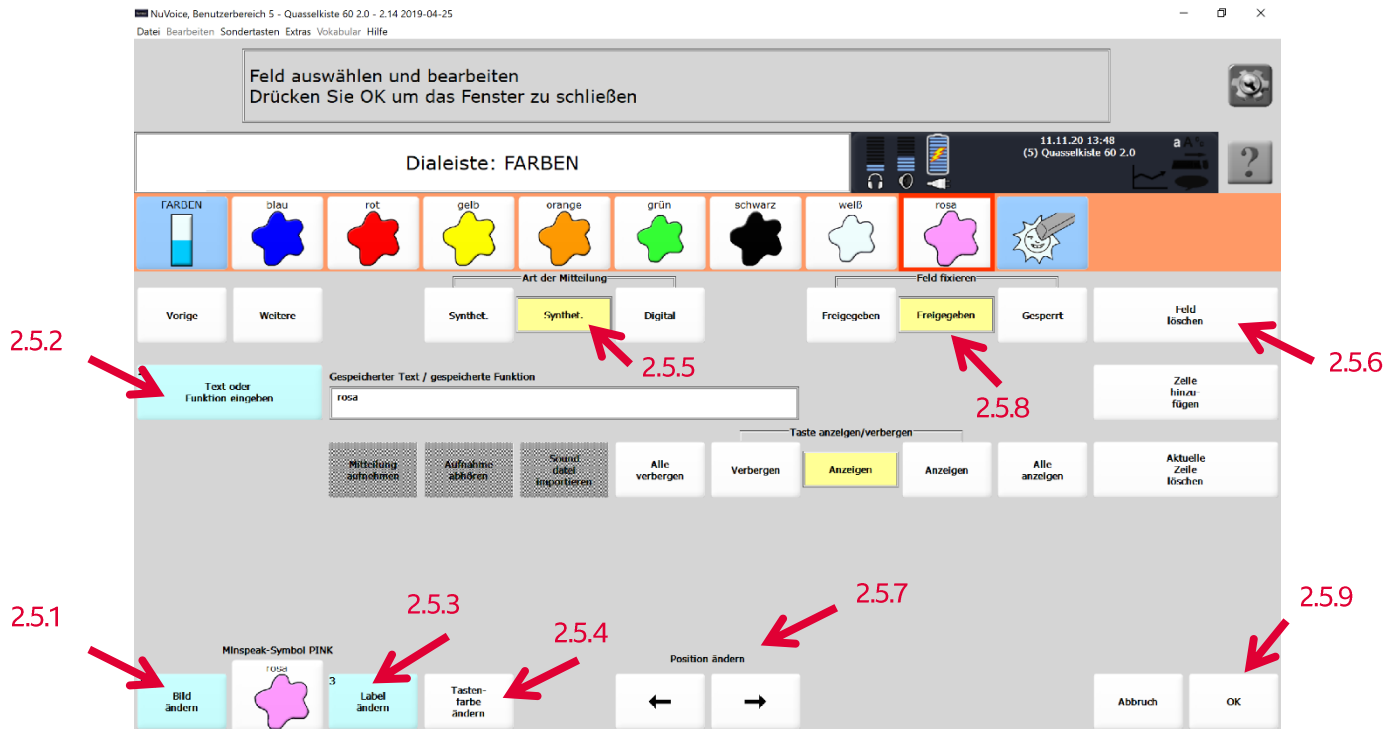

2.5.1. **Bild ändern:** Bild / Foto für das Feld auswählen. War das Feld bisher leer, wird der Bildname automatisch als Label und gesprochenen Text übernommen. Details siehe Abschnitt 3 «Bild ändern oder Foto einfügen».

2.5.2. **Text oder Funktion eingeben:** Vom Bildnamen abweichenden Text, der gesprochen, *oder* eine Funktion, die ausgeführt werden soll (z.B. siehe Abschnitt «Seite verknüpfen»)

ACHTUNG

Bei Texteingabe muss am Wortende ein Leerzeichen gemacht werden.

2.5.3. **Label ändern:** Vom Piktogramm-Namen abweichenden Text, der auf der Taste geschrieben sein soll.

Optional:

2.5.4. **Tastenfarbe ändern**

2.5.5. **Art der Mitteilung:** «synthetisch» oder «digital» (= eigene Sprachaufnahmen)

2.5.6. **Feld löschen**



we integrate. active.

2.5.7. **Position ändern:** Nur in Dialeiste verfügbar! Mit Pfeilen das Feld verschieben.

2.5.8. **Feld fixieren:** Nur in Dialeiste verfügbar! Feld nach Häufigkeit der Nutzung anordnen (wenn Funktion im Menü FEEDBACK aktiviert) oder an der gegebenen Position verankern.



2.5.9. Änderungen mit «OK» speichern

ACHTUNG

Es ist empfehlenswert, neue Wörter in der Dialeiste zu speichern, wenn dort bereits dazu passende Begriffe vorhanden sind. Am oben dargestellten Beispiel ist ersichtlich, dass in der Dialeiste schon diverse Farben gespeichert sind, wodurch neue Farben ebenfalls in der Dialeiste abgelegt werden können. Es ist auch möglich, innerhalb einer Dialeiste eine neue Dialeiste/«Ordner» zu erstellen (Details siehe Abschnitt «Neue Dialeiste anlegen») und die neuen Begriffe dort abzulegen. Passt ein Begriff nicht in die Dialeiste, kann dieser auch im vorhandenen Kernvokabular gespeichert werden (siehe in der nachfolgenden Abbildung das Wort «Galerie»). Dann stehen bei der Bearbeitung mittels Setup-Taste nur die oben genannten Punkte 2.5.1-2.5.5 und 2.5.9 zur Verfügung. Die Tastenfarbe soll dann an die Wortart angepasst werden.



we integrate. active.

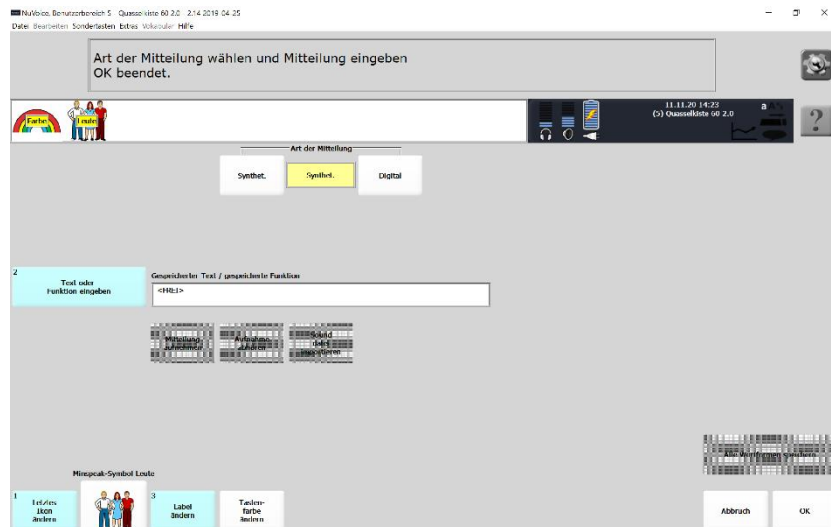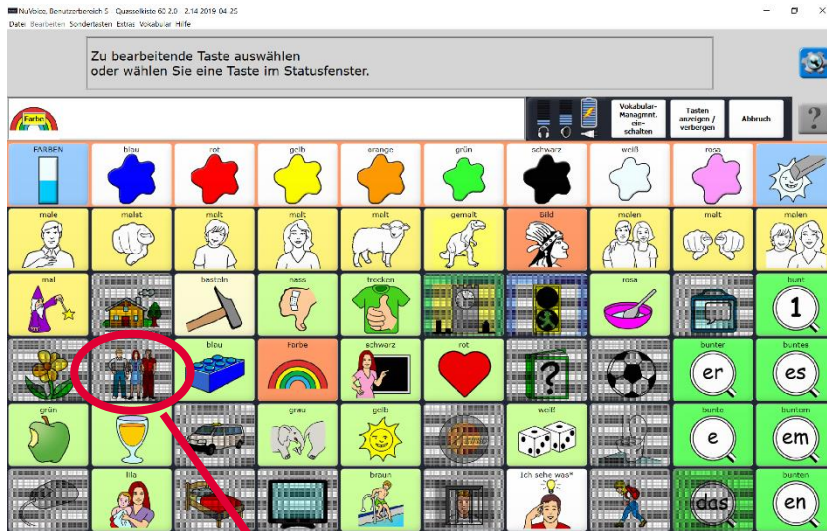




we integrate. active.

ACHTUNG


Auf der NuVoice-Software kann ein Feld alternativ zur Bearbeitung mittels Setup-Taste auch direkt mit einem Rechtsklick bearbeitet werden. Auf dem Talker funktioniert das ebenso, es wird für den Rechtsklick jedoch eine USB-Maus benötigt.

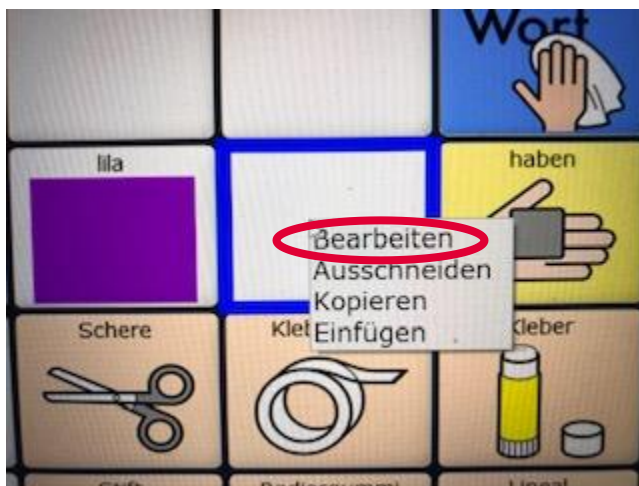

3. Bild ändern oder Foto einfügen

3.1. Schritte 2.1-2.4 aus Abschnitt 2 «Feld bearbeiten via Setup-Taste» wiederholen

3.2. «Bild ändern» drücken, sodass die folgende Seite erscheint, welche verschiedene Optionen auflistet

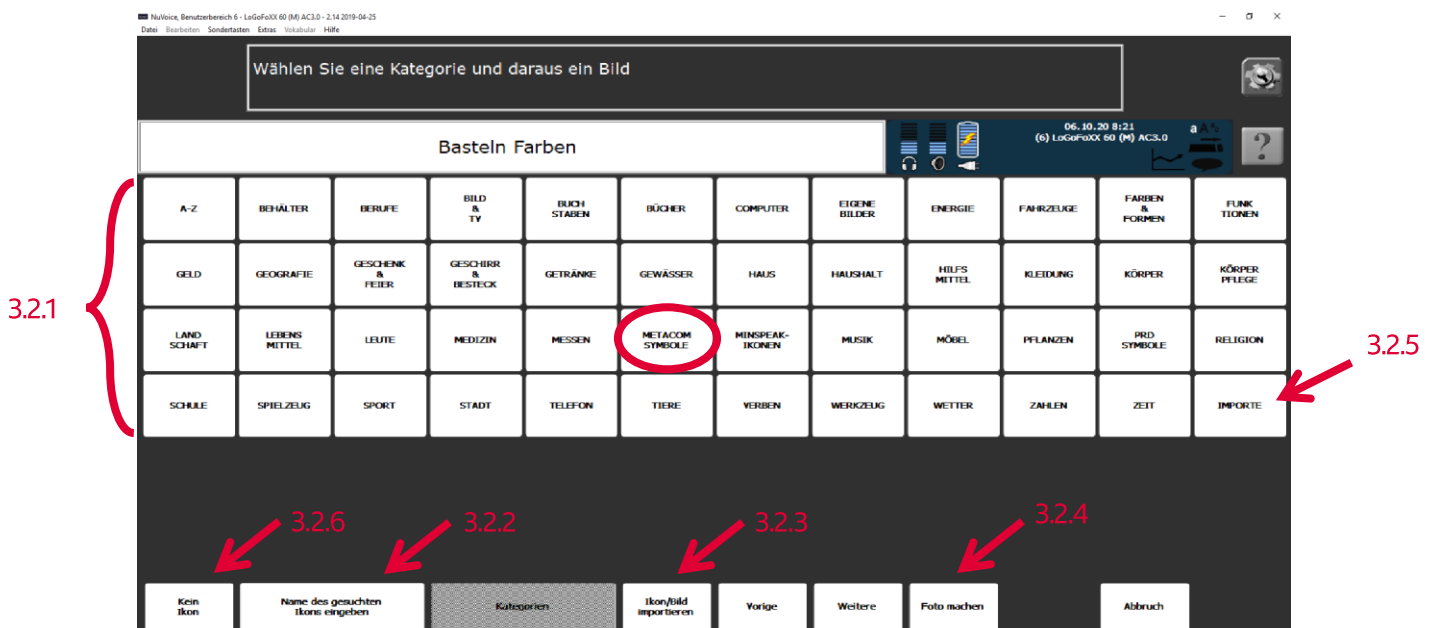

3.2.1. Nach A-Z oder in einzelnen Kategorien (inkl. Kategorie «Metacom Symbole») nach gewünschtem Ikon / Piktogramm suchen

3.2.2. Unter «Name des gesuchten Ikon eingeben» via Tastatur manuell nach einem Ikon / Piktogramm suchen

3.2.3. Unter «Ikon/Bild importieren» eigene Fotos von USB-Stick einfügen

3.2.4. Unter «Foto machen» direkt mit der Talker-Kamera (Front/Back) ein Foto aufnehmen

3.2.5. Unter «Importe» vorgängig in die Software eingefügte eigene Fotos suchen

3.2.6. «Kein Ikon», wenn nur der Text auf der Taste angezeigt werden soll



we integrate. active.


4. Neue Dialeiste anlegen

4.1. Toolbox öffnen

4.2. «Dialeiste anlegen» **DIALEISTE ANLEGEN** wählen

4.3. Dialeiste benennen (Beispiel: «Sportmaterial») und mit «OK» bestätigen

4.4. Dialeiste bearbeiten

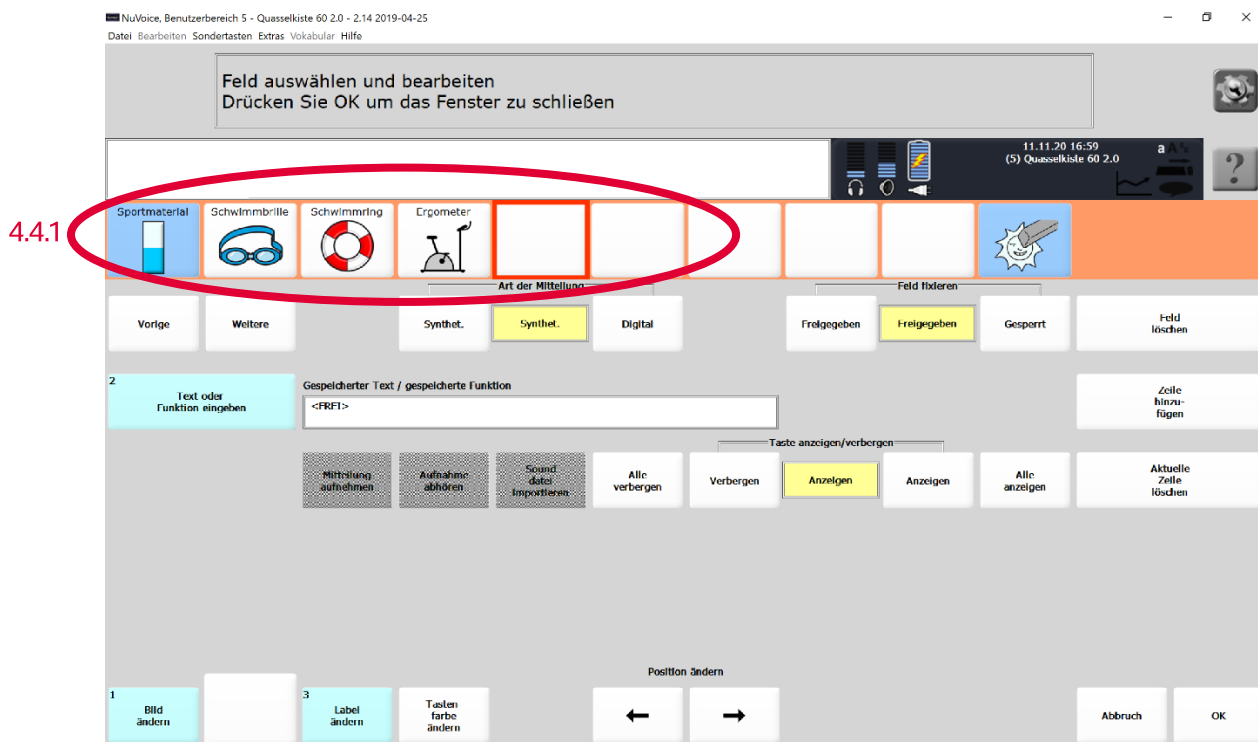

4.4.1. Gewünschte Felder der Dialeiste erstellen, siehe Schritt 2.5 im Abschnitt 2 «Feld bearbeiten mit Setup-Taste».


Erstes Feld: Bild = Piktogramm «weiter», Text oder Funktion = «WEITERE», Label = Name der Dialeiste, Tastenfarbe = hellblau.

4.4.2. Änderungen mit «OK» speichern



we integrate. active.

- 4.5. Neue Dialeiste erscheint in der Liste aller verfügbaren Dialeisten (nicht abgebildet), bestätigen mit «OK».
- 4.6. Zur Seite navigieren, auf der die Dialeiste verknüpft werden soll.
- 4.7. Setup-Taste anwählen
- 4.8. Dialeiste verknüpfen

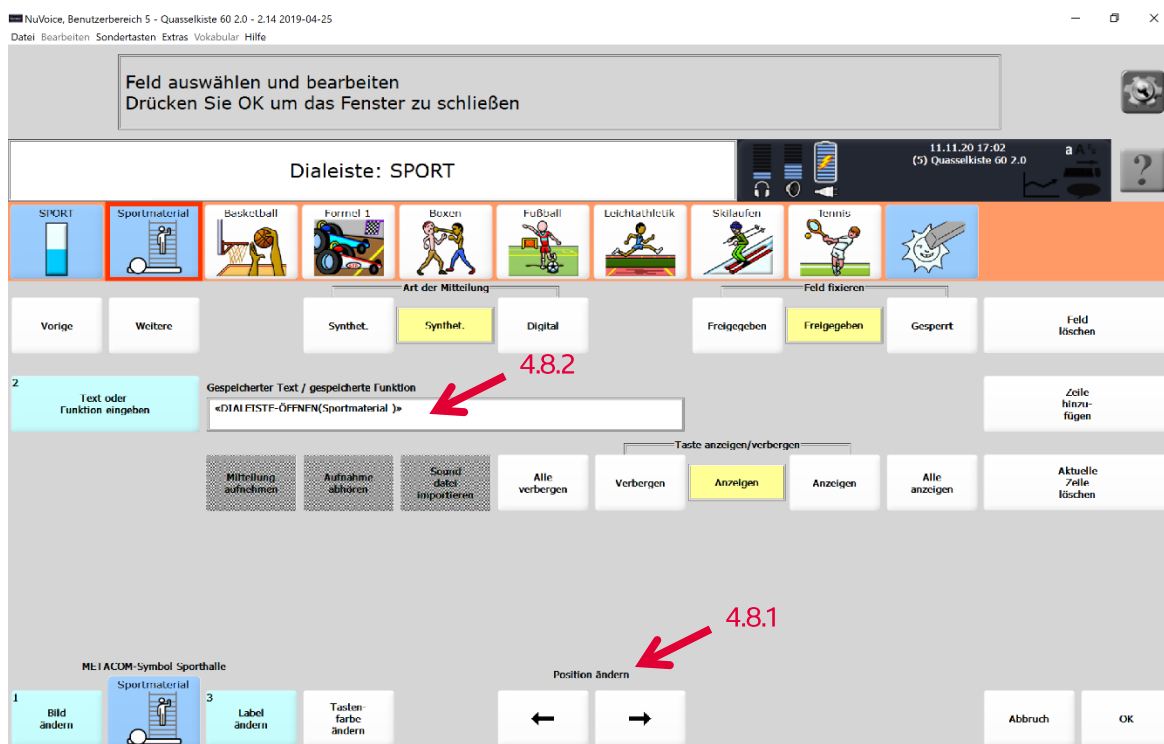

4.8.1. Ggf. an der ersten Stelle in der vorhandenen Dialeiste Platz schaffen: Ein leeres Feld mit den Pfeilen an die erste Stelle verschieben. (nicht abgebildet)

4.8.2. Leeres Feld in der Dialeiste anwählen und Schritt 2.5 im Abschnitt 2 «Feld bearbeiten mit Setup-Taste» befolgen.

ACHTUNG

Statt Text wird nun die Funktion «Dialeiste öffnen» benötigt. Nach Auswahl der Funktion die gewünschte zu verknüpfende Dialeiste anwählen und mit «OK» bestätigen (nicht abgebildet).

4.8.3. Änderungen mit «OK» speichern.




we integrate. active.

5. Neuer Kern speichern

Vor allem bei neuen Verben und Adjektiven ist es ratsam, diese weder in der Dialekte noch im vorhandenen Kernvokabular, sondern in einem neuen Kern zu speichern. Dadurch steht auf einer neu freigeschalteten Seite genügend Platz zur Verfügung, um alle konjugierten Formen abzulegen.

5.1. Toolbox öffnen


5.2. «Kern speichern»  wählen

5.3. Komplette, neue Ikonensequenz eingeben, mit «OK bestätigen




we integrate. active.

5.4. Taste bearbeiten

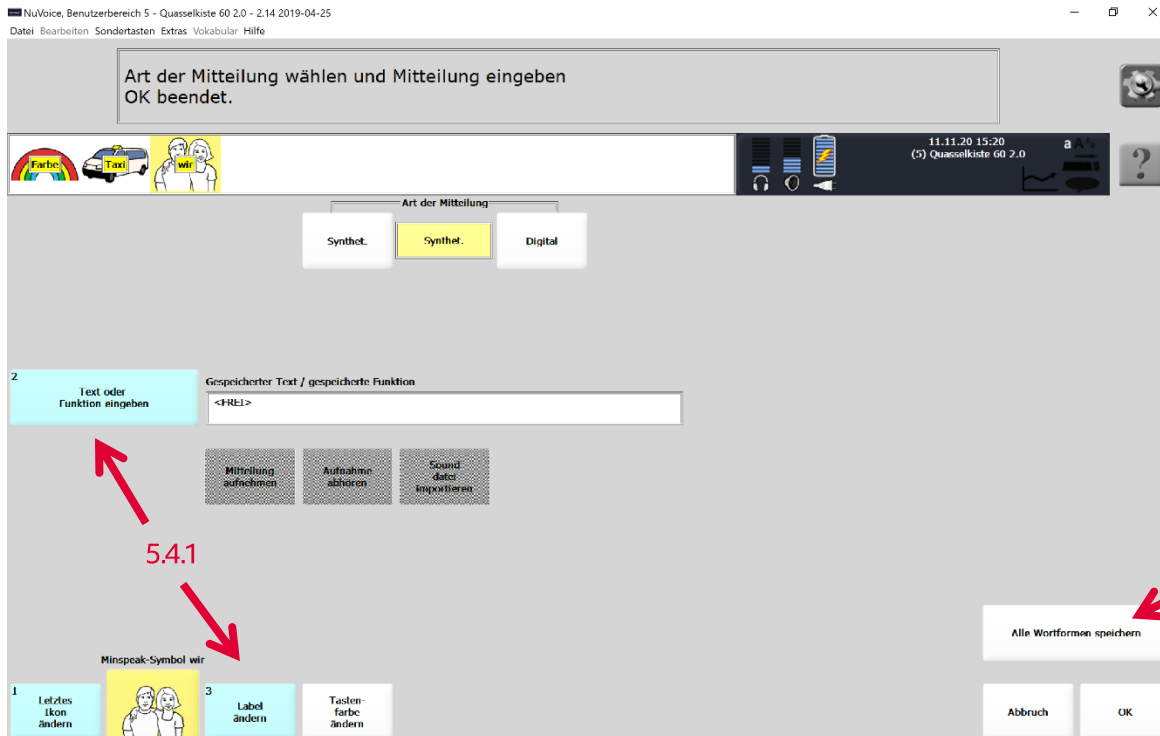

5.4.1. Text eingeben und Label ändern: Bei Verben und Adjektiven jeweils die Grundform. Das Icon wird nicht verändert.

5.4.2. Alle Wortformen speichern


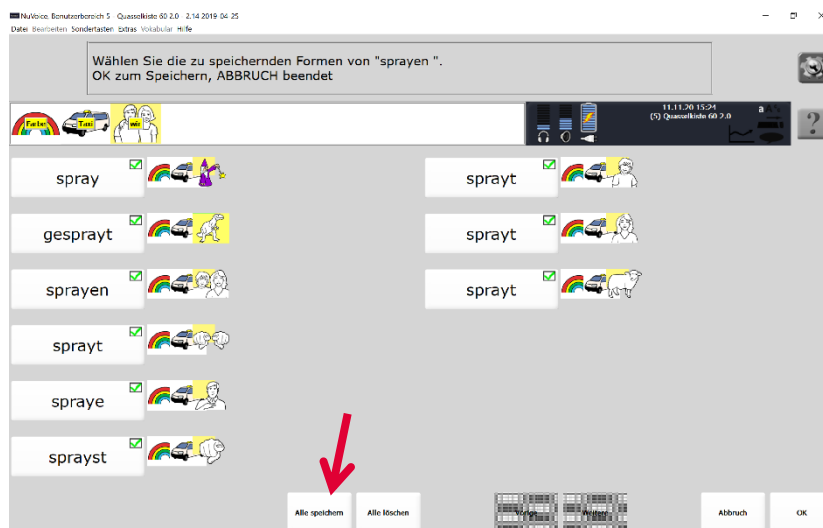


Mit «Alle speichern» grüne Häkchen erzeugen.



we integrate. active.

5.4.3. Änderungen mit 2x «OK» speichern, sodass folgendes Endresultat:

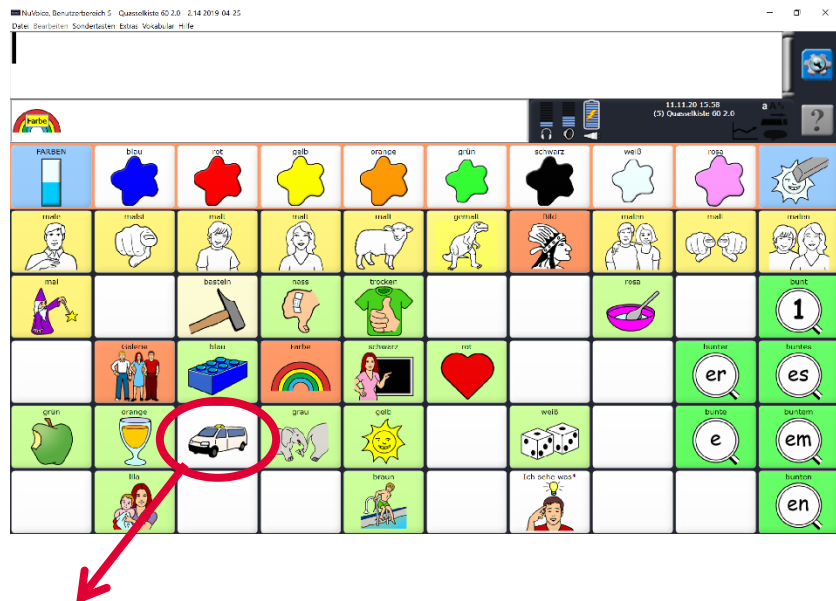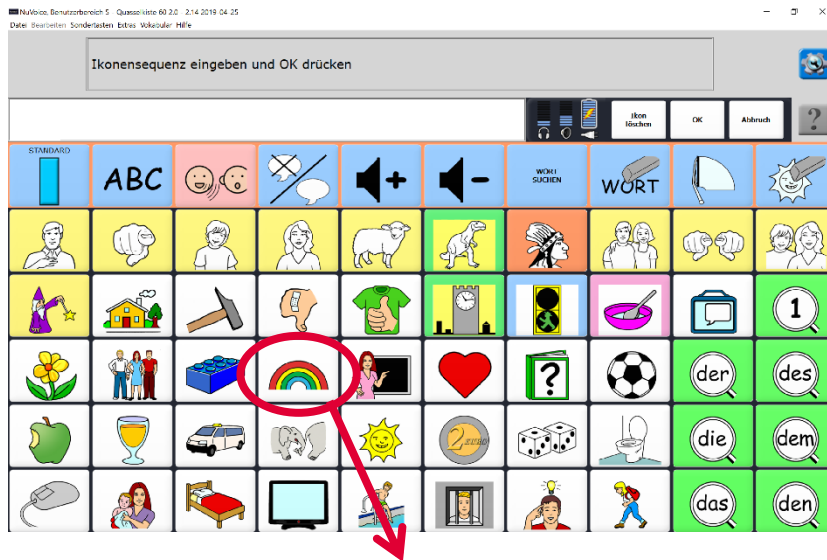


ACHTUNG

Das Mittlere Ikon (hier Taxi) ist jetzt zwar freigeschaltet, aber noch ohne Label und Tastenfarbe (siehe Abschnitt 6).



we integrate. active.

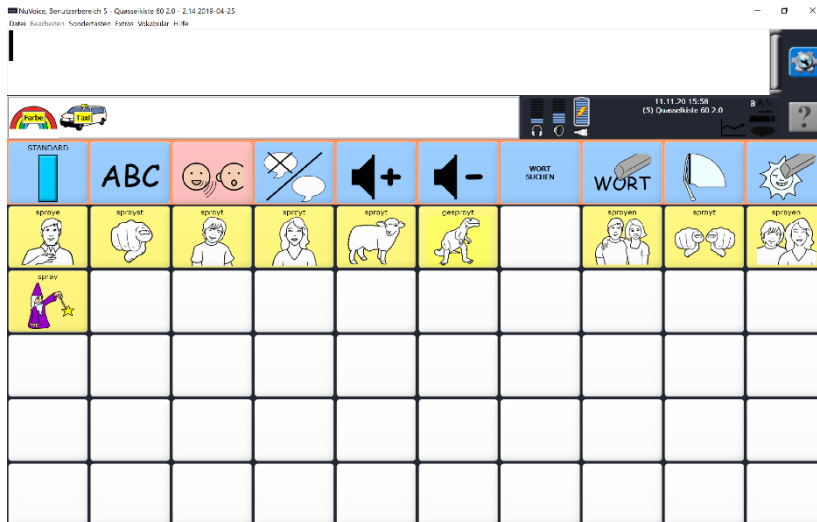

ACHTUNG

Gebeugte Adjektive erscheinen
jetzt an der Stelle aller Lupen.



we integrate. active.

6. Mittleres Ikon anpassen


Nachdem ein neuer Kern gespeichert worden ist, muss abschliessend noch das Mittlere Ikon angepasst werden.

6.1. Menü TOOLS öffnen

6.2. «Mittleres Ikon anpassen» wählen

6.3. Ikonensequenz bis und mit Mittleres Ikon drücken, mit «OK» bestätigen

6.4. Mittleres Ikon bearbeiten

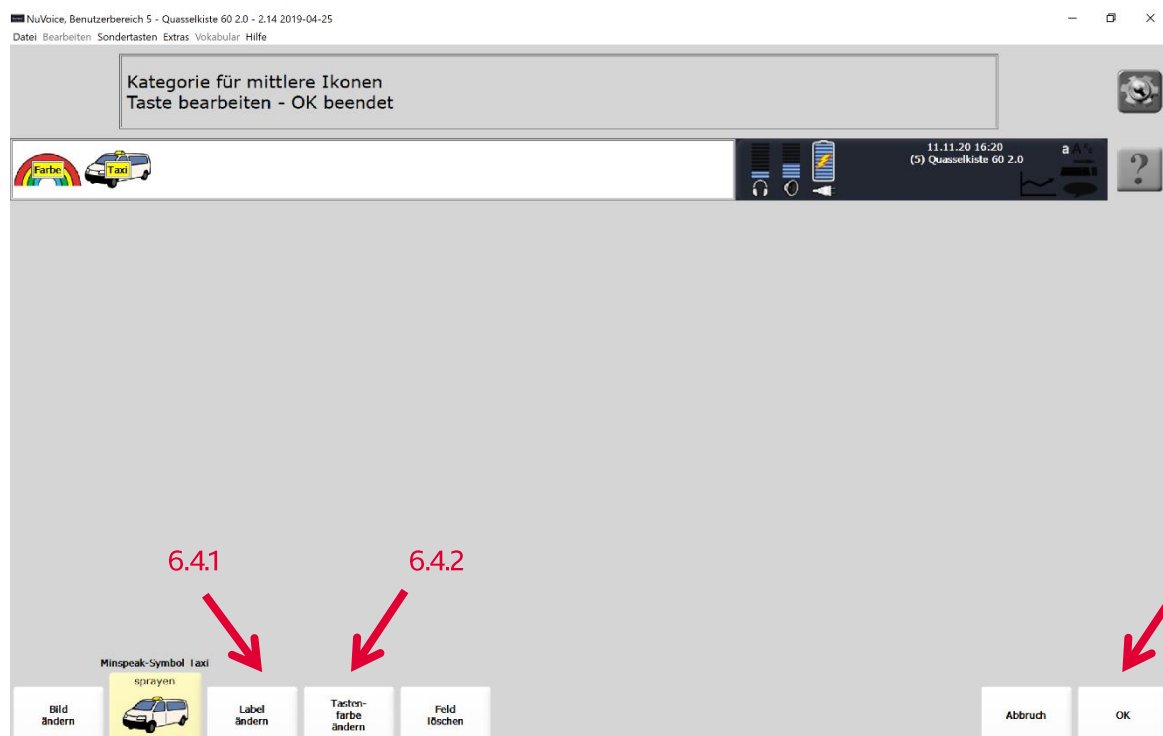

6.4.1. Label ändern (= vorgängig als neuer Kern gespeichertes Wort in der Grundform)

6.4.2. Tastenfärbefarbe ändern (Verb: hellgelb; Adjektiv: hellgrün)

6.4.3. Änderungen mit «OK» speichern




we integrate. active.

7. Sprachausnahmen


7.1. Toolbox öffnen

7.2. «Menü Aussprache» wählen

7.3. Lexikon der Sprechstimme wählen

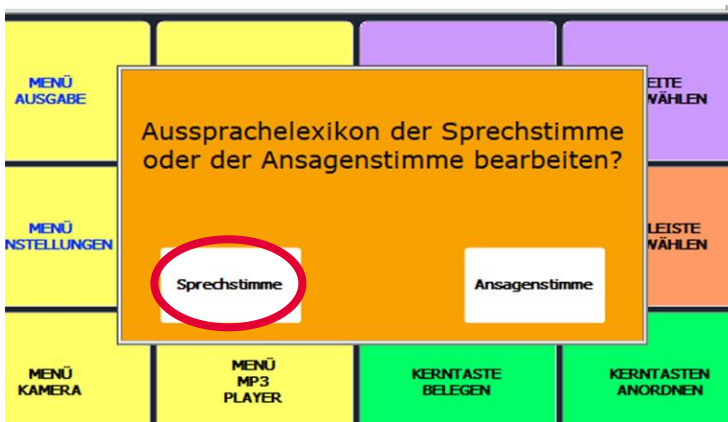


7.4. Wort hinzufügen

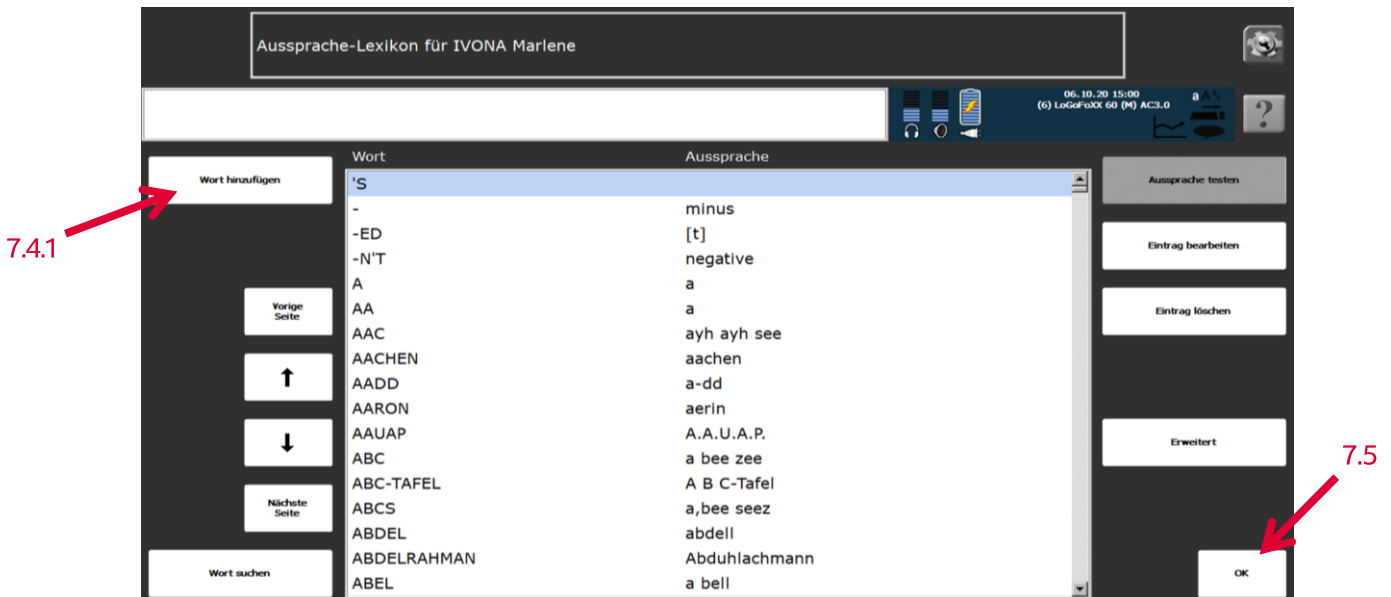

7.4.1. «Wort hinzufügen» drücken




we integrate. active.

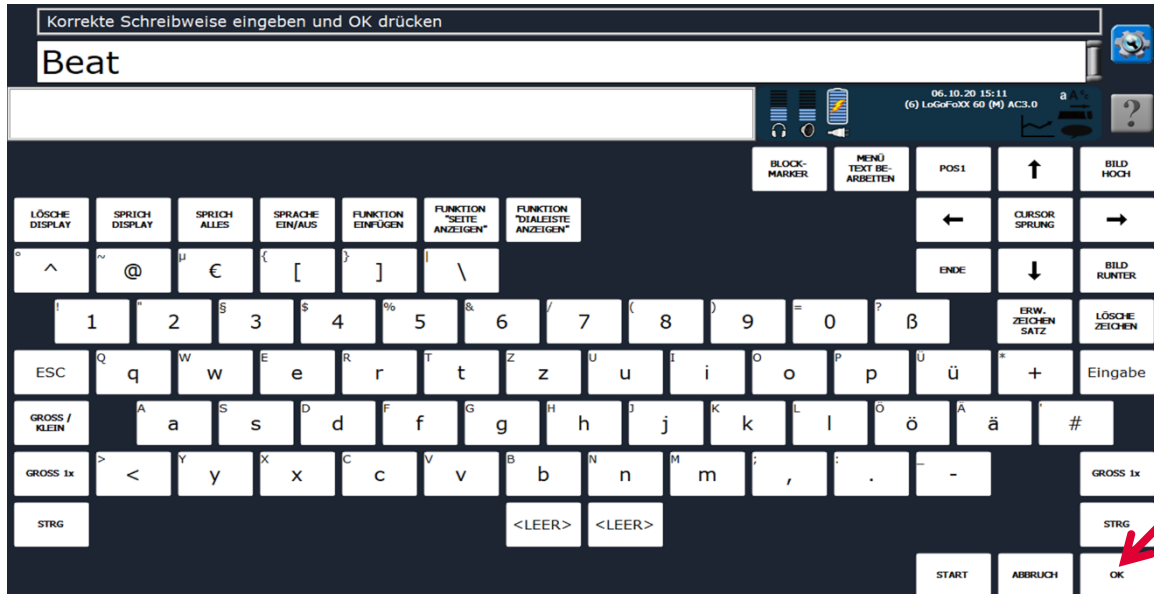

7.4.2. Wort schreiben (ohne Leerzeichen am Wortende)

7.4.3. Mit «OK» bestätigen

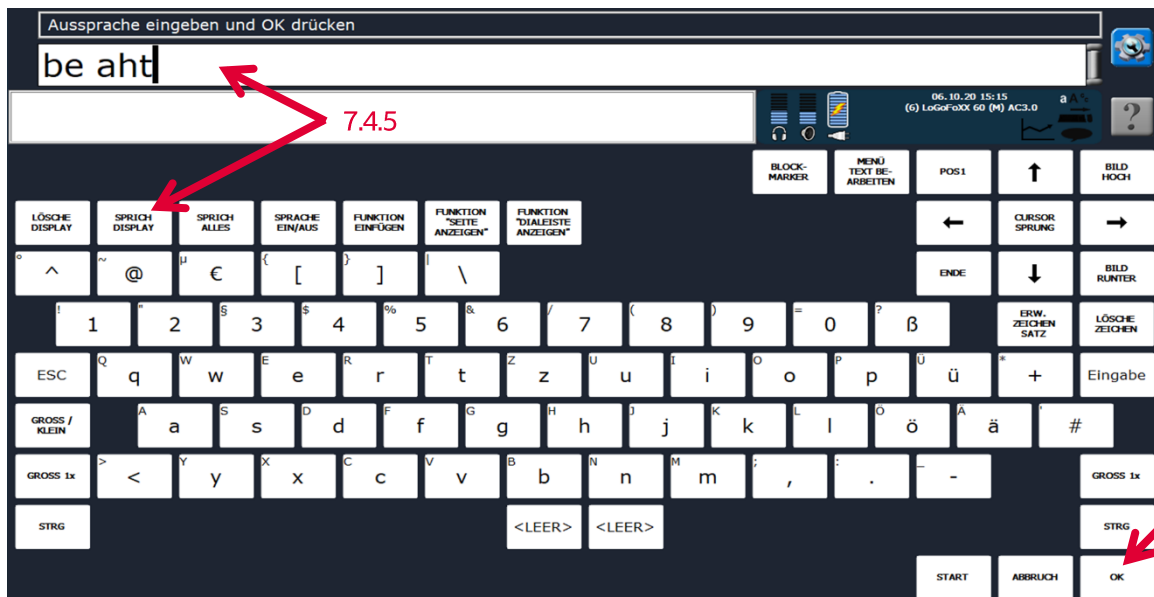

7.4.4. Phonetische Schreibweise eingeben

7.4.5. In das Textfenster oder auf die Taste «Sprich Display» klicken, um Aussprache anzuhören

7.4.6. Mit «OK» bestätigen



we integrate. active.

7.5. Änderungen mit «OK» speichern

8. Backup

Das Vokabular muss regelmässig extern abgespeichert werden, damit alle Daten im Falle eines Defektes auf ein neues Gerät geladen werden können.


8.1. Toolbox öffnen

8.2. USB-Stick einstecken

8.3. «Menü Speicherübertragung» wählen

MENÜ
SPEICHER
ÜBERTRAGUNG

8.4. Sicherung mit USB-Stick durchführen

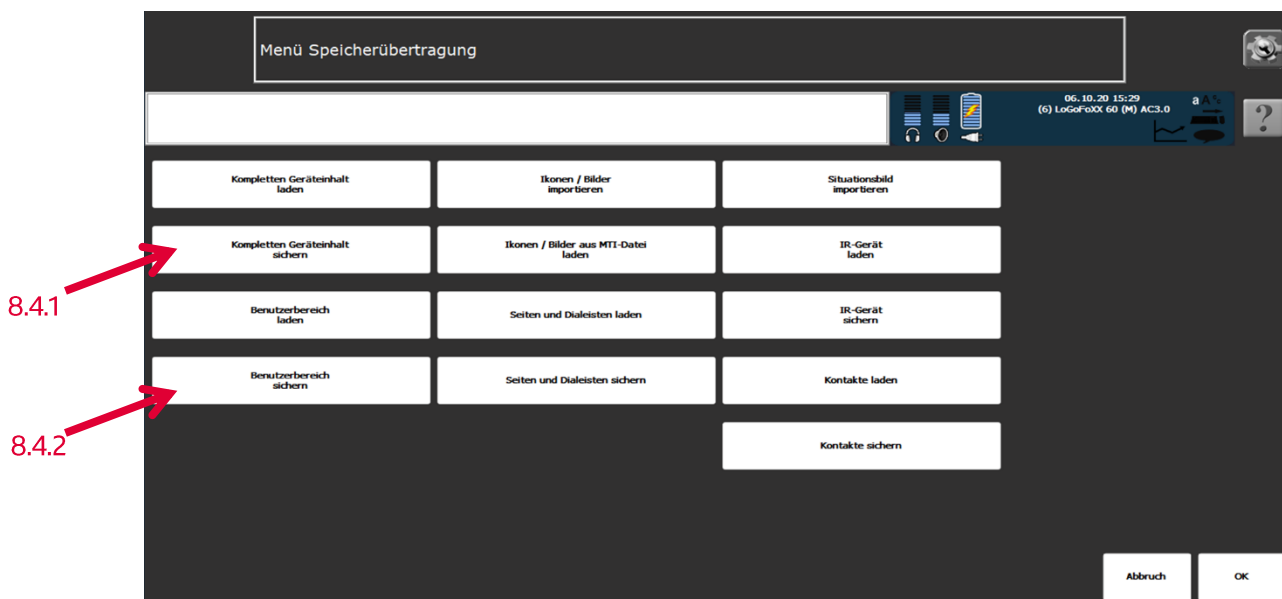


8.4.1. «Kompletten Geräteinhalt sichern» → speichert alle im Talker gespeicherten Daten

oder


8.4.2. «Benutzerbereich sichern» → speichert nur die Daten im Benutzerbereich

8.4.3. Speicherort wählen

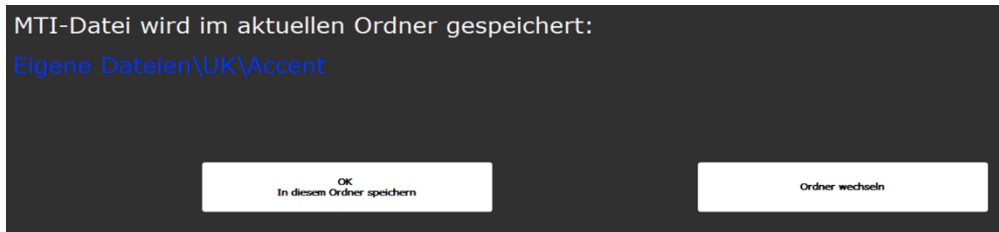


Mit «OK» im angezeigten Ordner bleiben
oder

Mit «Ordner wechseln» und ggf. «Verzeichnis nach oben» (nicht abgebildet) den USB-Stick suchen

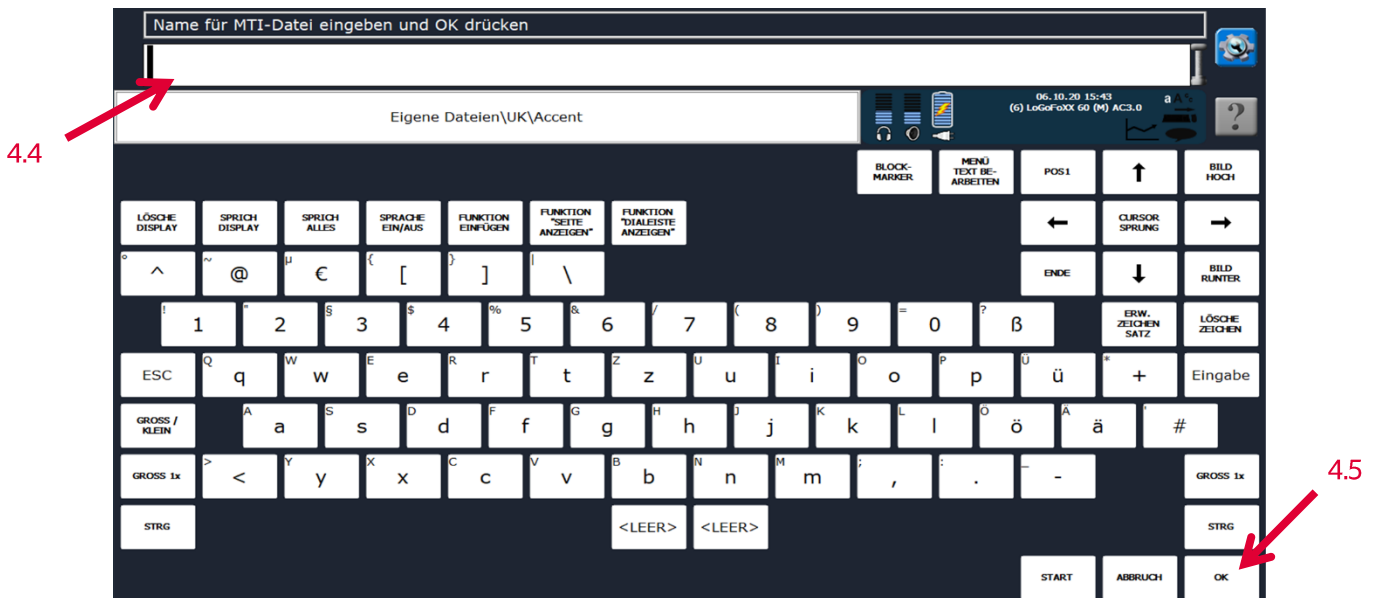

8.4.4. Dateinamen eingeben (z.B. HansMustermann20201006)

8.4.5. Mit «OK» bestätigen

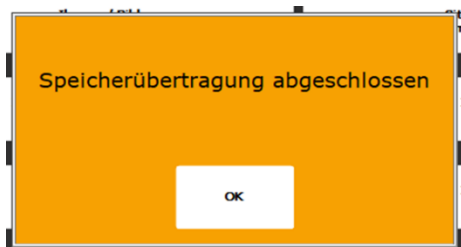

8.4.6. Wenn die Meldung «Speicherübertragung abgeschlossen» erscheint, mit 3x «OK» zum Vokabular zurückkehren und USB-Stick entfernen.