




we integrate. active.

Kurzanleitung Communicator 5

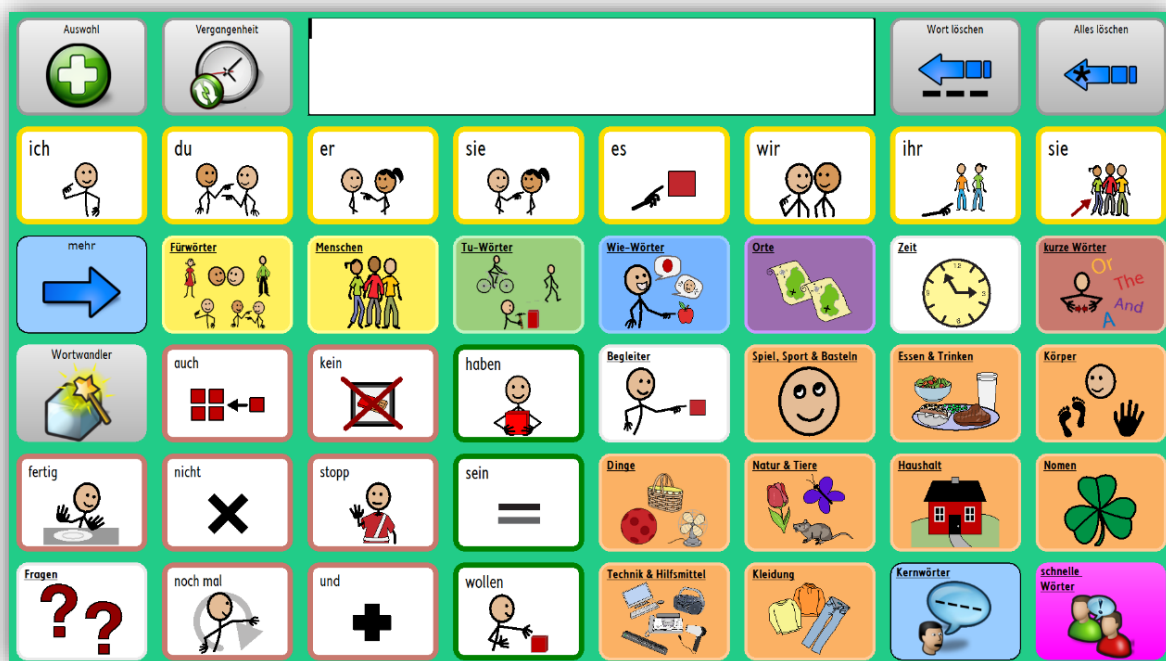



we integrate. active.


Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Kurzanleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1.	Feld bearbeiten.....	3
2.	Änderungen speichern.....	6
3.	Sprachausnahmen.....	7
4.	Backup.....	10

1. Feld bearbeiten

1.1. Zur Seite navigieren, auf der eine Taste bearbeitet werden soll

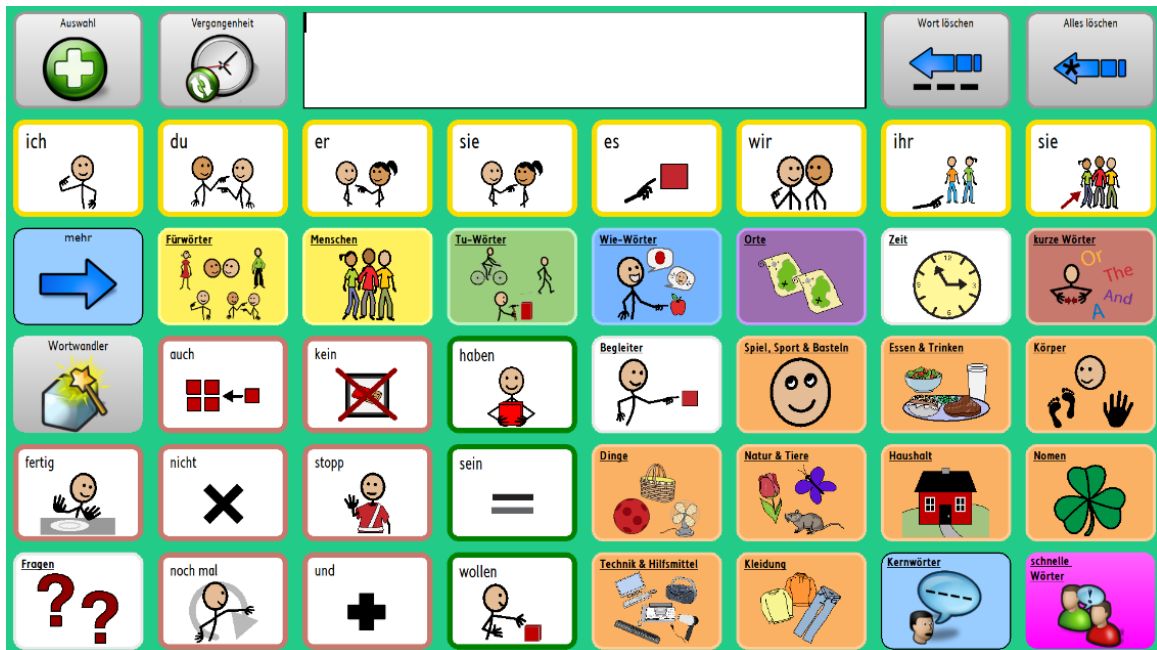

1.2. Schnellmenü aufrufen:

- > Ctrl + M auf der Tastatur
oder
- > Rechtsklick mit der Maus
oder
- > Langes Drücken des Touchscreens

1.3. «Bearbeiten-Schaltfläche» anwählen



1.4. Alle Felder erscheinen rot umrandet. Das Feld anklicken, welches bearbeitet werden soll.


Das Menü «Bearbeiten-Schaltfläche» erscheint.





we integrate. active.

1.5. Feld bearbeiten

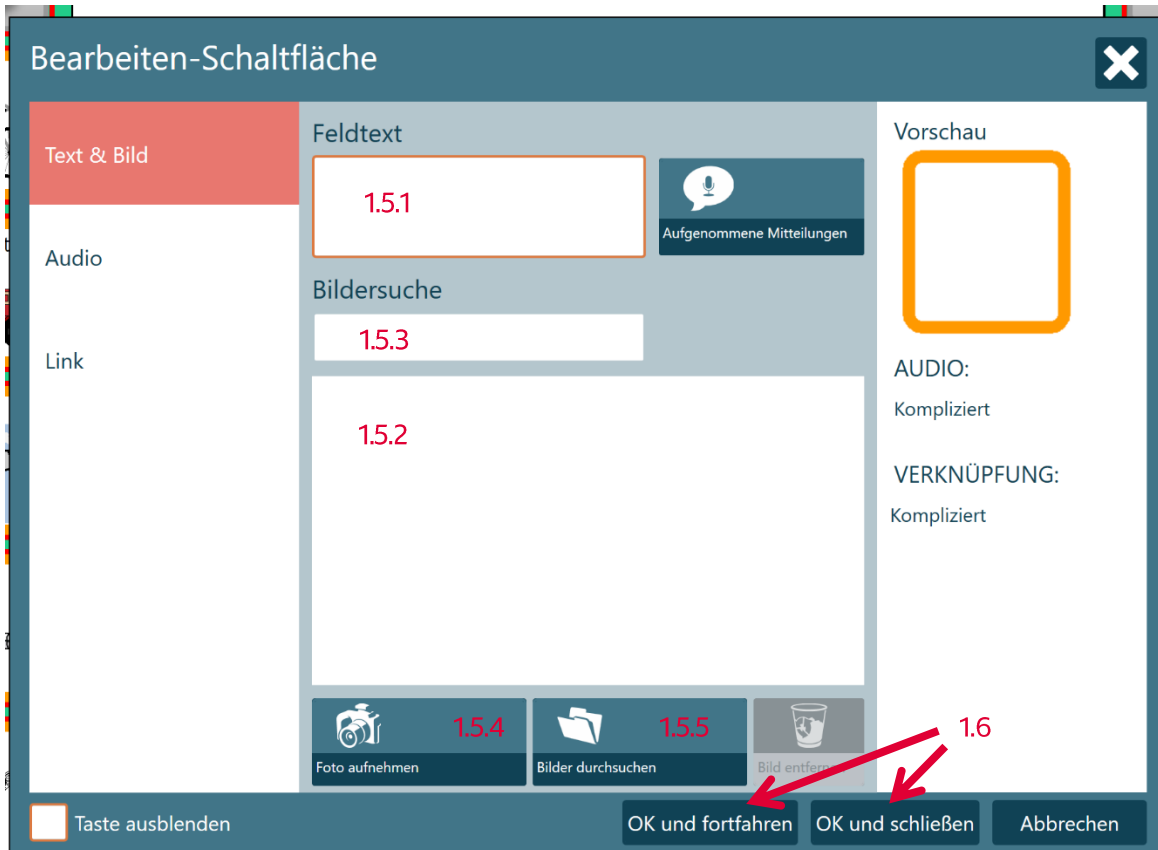

1.5.1. Feldtext bearbeiten

1.5.2. Vorgeschlagenes Piktogramm übernehmen, *oder*

1.5.3. Unter «Bildersuche» einen alternativen Suchbegriff eingeben und anderes Pikto wählen, *oder*

1.5.4. Foto aufnehmen, *oder*

1.5.5. Bereits gespeichertes Bild auswählen

1.6. Mit «OK und fortfahren» ein weiteres Feld bearbeiten, *oder*


mit «OK und schliessen» die Bearbeitung beenden



we integrate. active.

2. Änderungen speichern

Nach durchgeführten Änderungen zeigt Communicator 5 links oben «Nicht gespeicherte Änderungen» an.

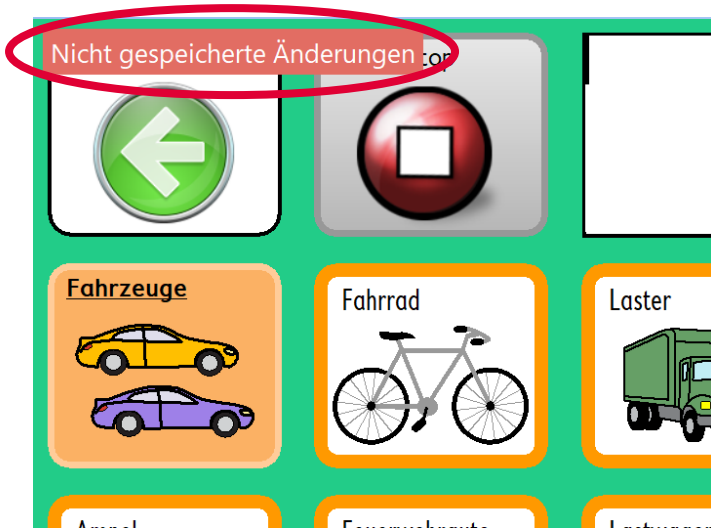

2.1. Schnellmenü aufrufen (siehe Punkt 1.2.)

2.2. «Speichern» wählen





we integrate. active.


3. Sprachausnahmen

3.1. Schnellmenü aufrufen (siehe Punkt 1.2.)


3.2. «Erweiterte Einstellungen» wählen




3.3. Reiter «Tastaturen und Sprache», dann «Alternative Betonungen» wählen

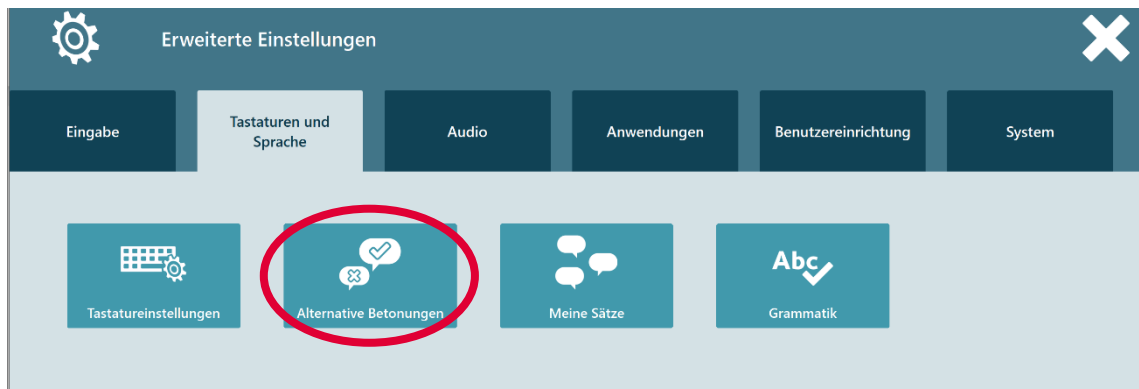

3.4. «Neu» wählen

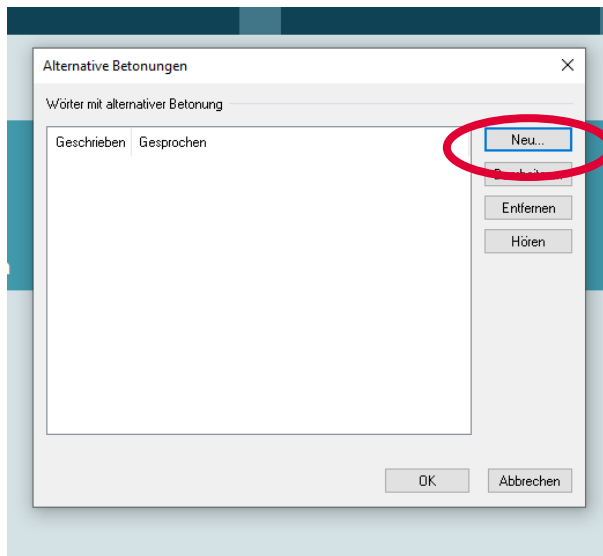

3.5. Betonung ändern

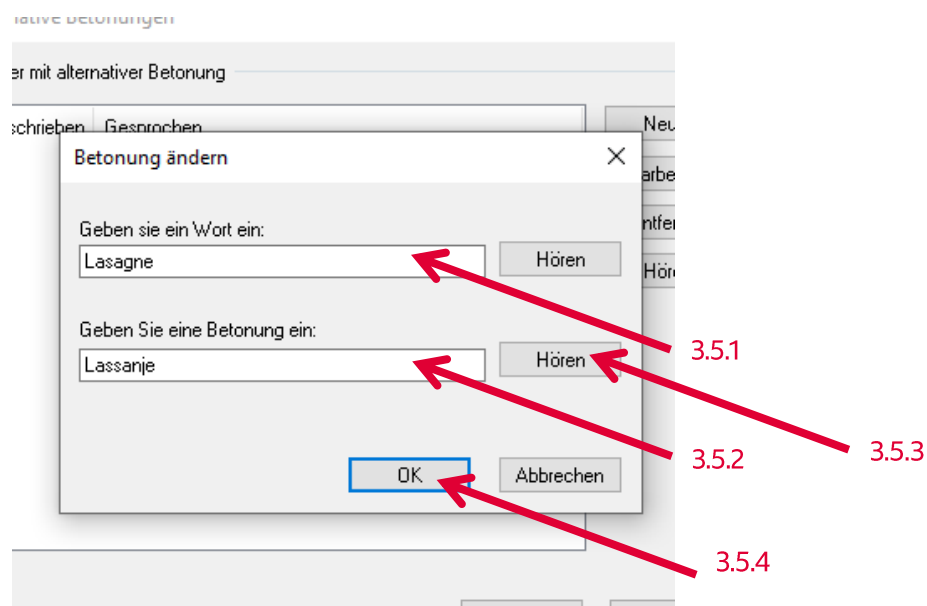

3.5.1. Wort eingeben

3.5.2. Betonung lautgetreu eingeben

3.5.3. Aussprache anhören

3.5.4. Mit «OK» bestätigen



we integrate. active.

3.6. Zum Anwendermodus zurückkehren





we integrate. active.


4. Backup

Das Vokabular muss regelmässig extern abgespeichert werden, damit alle Daten im Falle eines Defektes auf ein neues Gerät geladen werden können.

4.1. USB-Stick mit Gerät verbinden

4.2. Schnellmenü aufrufen (siehe Punkt 1.2.)


4.3. «Fenstermodus» wählen

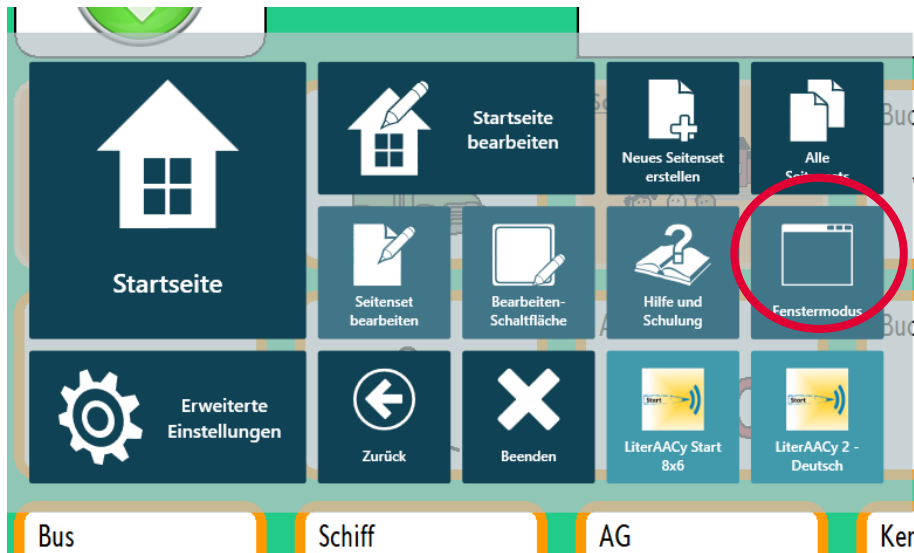




we integrate. active.

4.4. In der Leiste oben bei «Datei» auf «Import/Export von Einstellungen und Daten...» klicken

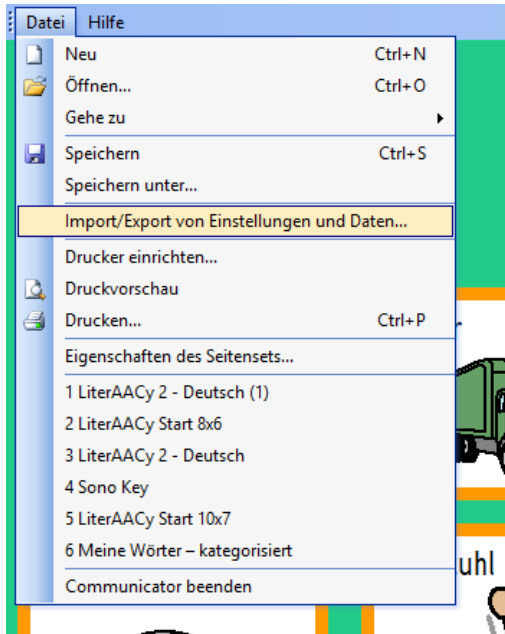


4.5. «Gewählte Einstellungen und Daten exportieren» aktivieren, bestätigen mit «Weiter»

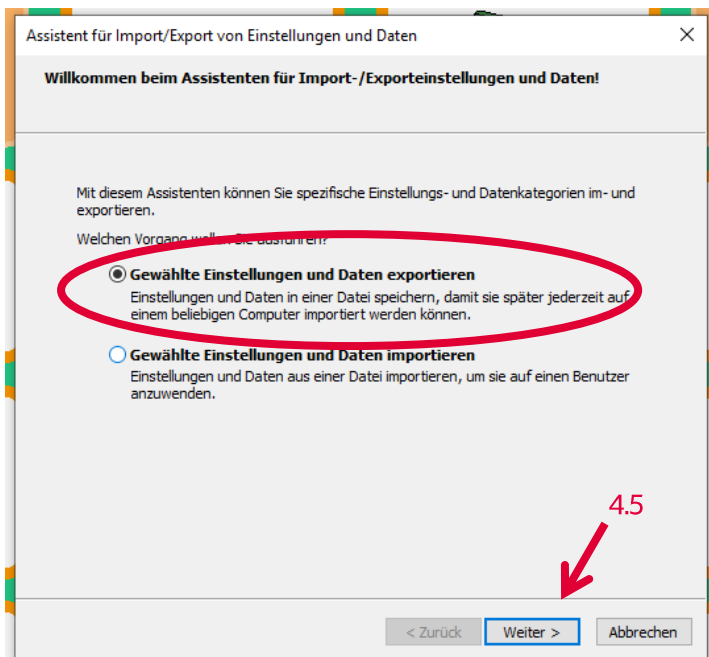




we integrate. active.

4.6. «Vollständiger Export» wählen, bestätigen mit «Weiter»

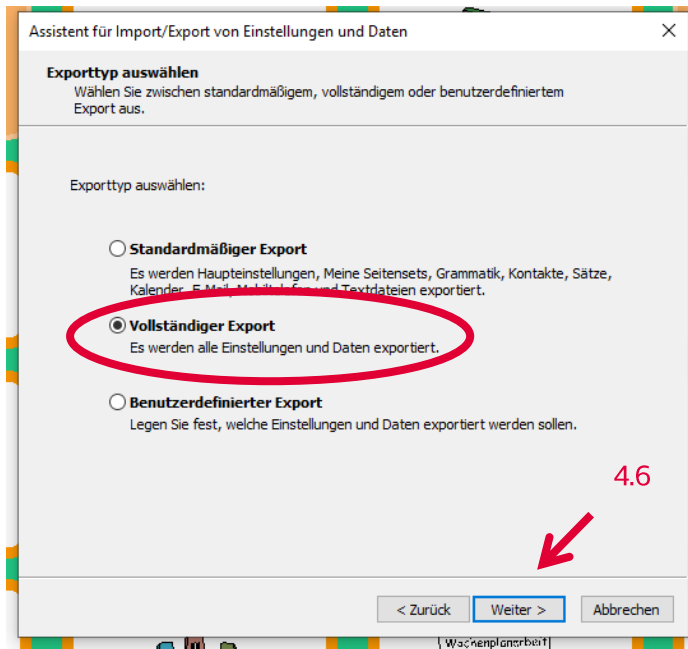

4.7. Backup-Datei benennen und «Durchsuchen» wählen

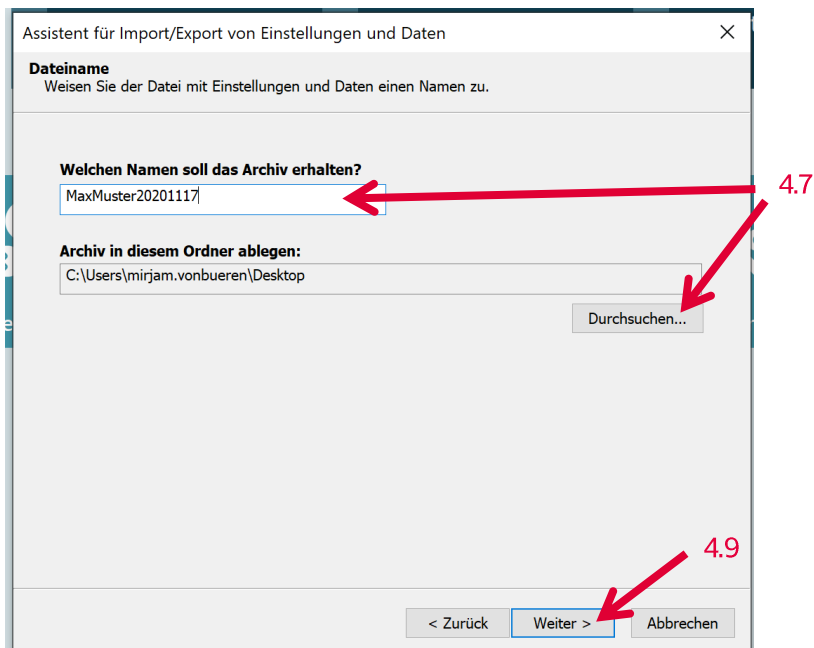



we integrate. active.

4.8. USB-Stick anwählen und mit «OK» bestätigen (nicht abgebildet)

4.9. «Weiter» anklicken

4.10. Via Schnellmenü in den Vollbild- und Anwendermodus zurückkehren (nicht abgebildet)