



we integrate. active.

Anleitung

LoGoFoXX auf Empower/Accent





we integrate. active.

Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Anleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1. Toolbox öffnen	3
2. Taste erstellen und bearbeiten.....	4
3. Seite erstellen.....	8
4. Taste mit Seite verknüpfen.....	11
5. Aussprache anpassen.....	14
6. Backup	17




we integrate. active.


Die Anleitung erklärt erste Schritte in der Programmierung der Software Empower auf dem Accent oder auf der PC-Emulation.

1. Toolbox öffnen


1.1. Auf dem Bildschirm Feld Menü drücken

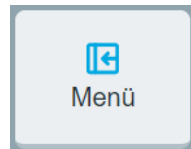

1.2. Feld Toolbox drücken

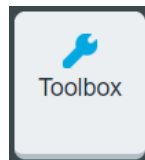

1.3. Toolbox öffnet sich

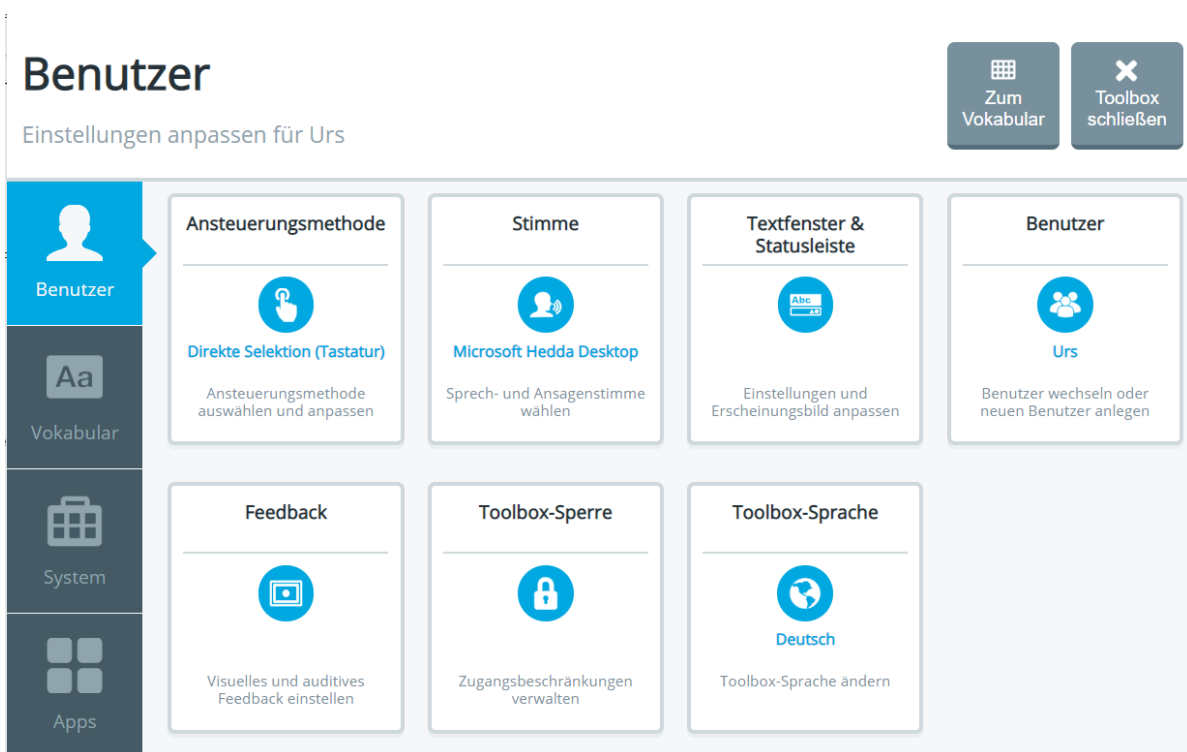

Die Toolbox (Werkzeugkasten) ist eine Ebene mit speziellen Funktionen zum Einstellen und Anpassen des Geräts und der Kommunikationssoftware, siehe Abschnitte 3, 4, 5 und 6 in dieser Anleitung.




we integrate. active.

2. Taste erstellen und bearbeiten


Um eine Taste zu erstellen oder zu bearbeiten, ist die Toolbox noch nicht relevant.

2.1. Zur Seite navigieren, auf der eine Taste bearbeitet werden soll


2.2. Menü drücken

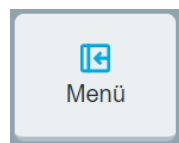

2.3. Editor drücken

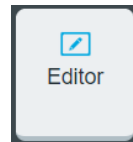

2.4. Auf neuer Ansicht folgende Schritte ausführen

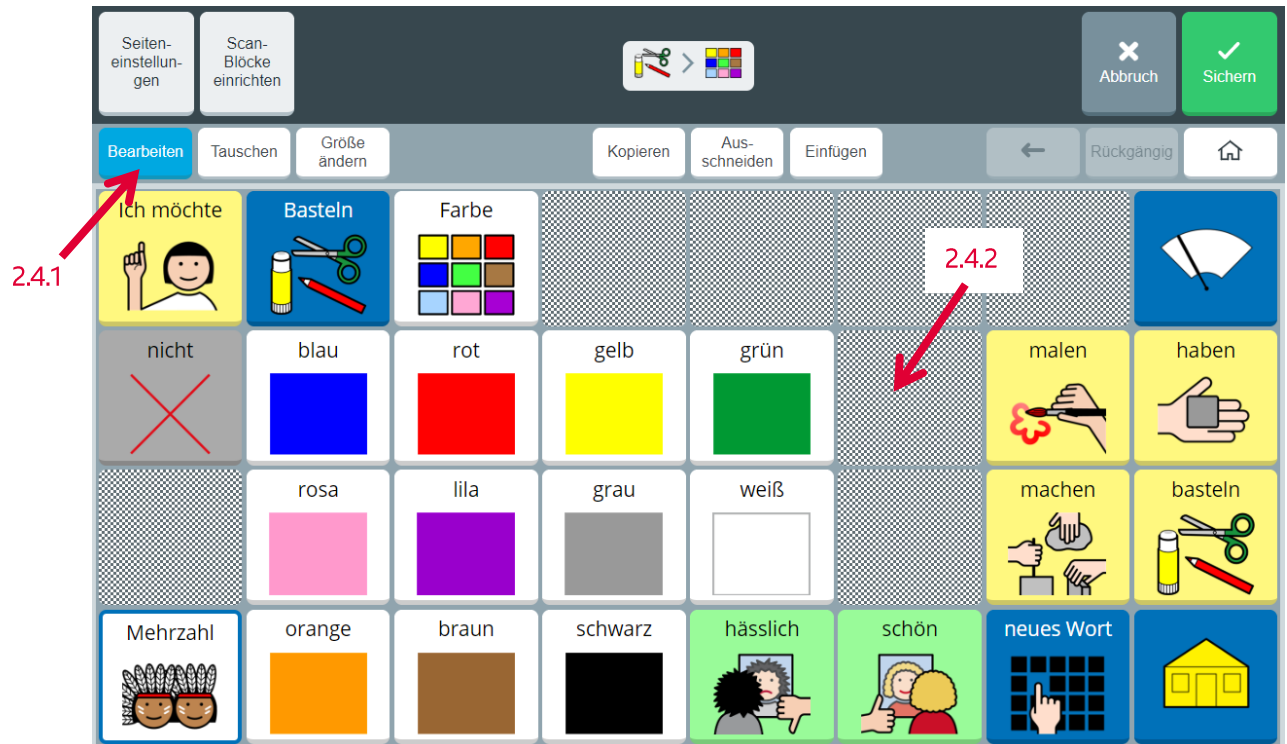

2.4.1. Bearbeiten drücken

2.4.2. Zu bearbeitende Taste drücken



we integrate. active.

2.5. Taste bearbeiten mit den folgenden Schritten

Taste bearbeiten

Mitteilung Wort oder Phrase hinzufügen

Label Label eingeben

Mitteilung

Farben

Symbol

Navigation

Funktionen

Einstellungen

Taste löschen

Vorgeschlagene Symbole

Für weitere Symbole klicken Sie links auf den Reiter "Symbol".

Kamera

Abbruch


Fertig

2.5.1. Mitteilung eingeben und mit Taste «Fertig» bestätigen

2.5.2. Label wird mit der Eingabe der Mitteilung automatisch ausgefüllt. Label nur eingeben, sofern das Feld anders angeschrieben sein soll, als die Mitteilung lautet.



we integrate. active.

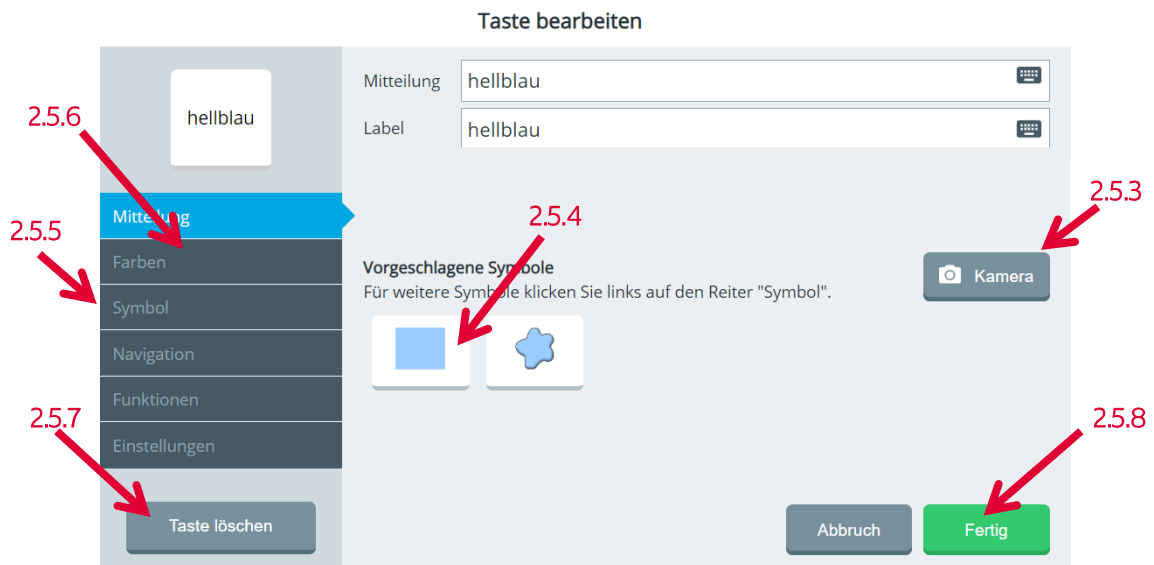

2.5.3. Foto machen oder

2.5.4. Vorgeschlagenes Symbol auswählen (sofern das Symbol passt)

2.5.5. Weitere Symbole können unter dem Menüpunkt «Symbol» gesucht werden

Optional:

2.5.6. Tastenfarbe ändern

2.5.7. Feld löschen

2.5.8. Änderungen mit «Fertig» speichern



2.6. Oben rechts auf «Sichern» drücken und Bearbeitung damit abschliessen (keine Abbildung)



we integrate. active.

3. Seite erstellen

3.1. Toolbox öffnen

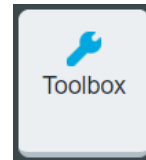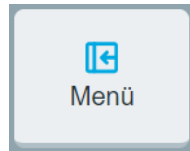

3.2. In Toolbox folgende Arbeitsschritte vornehmen

Vokabular

Vokabular auswählen und anpassen



The screenshot shows the 'Vokabular' interface. On the left is a sidebar with 'Benutzer', 'Vokabular' (highlighted in blue), 'System', and 'Apps'. The main area contains several panels: 'Vokabular auswählen' (with 'LoGoFoXX 32 1'), 'Fokuswörter' (with 'Status: AUS'), 'Vokabulareinstellungen' (with 'LoGoFoXX 32 1'), 'Editor', 'Seitenmanager', 'Tastaturen & Wortvorhersage', and 'Sprachdaten-Aufzeichnung'. Red arrows point to the 'Vokabular' menu item and the 'Seitenmanager' button.


3.2.1. Auf Vokabular drücken

3.2.2. Auf Seitenmanager drücken



we integrate. active.

3.3. Seitenmanager öffnet sich

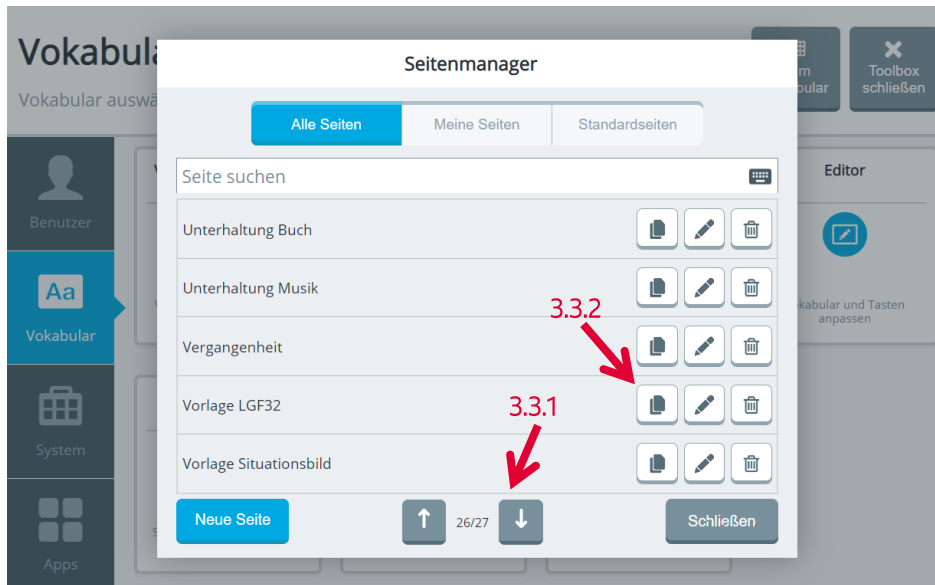

3.3.1. Mit Pfeil Vorlage des entsprechenden Vokabulars suchen

3.3.2. Duplizieren drücken

3.4. Neues Eingabefenster öffnet sich




3.4.1. Name der neuen Seite eingeben

3.4.2. Auf Anlegen drücken



we integrate. active.

3.5. Neu erstellte Seite öffnet sich im Editiermodus

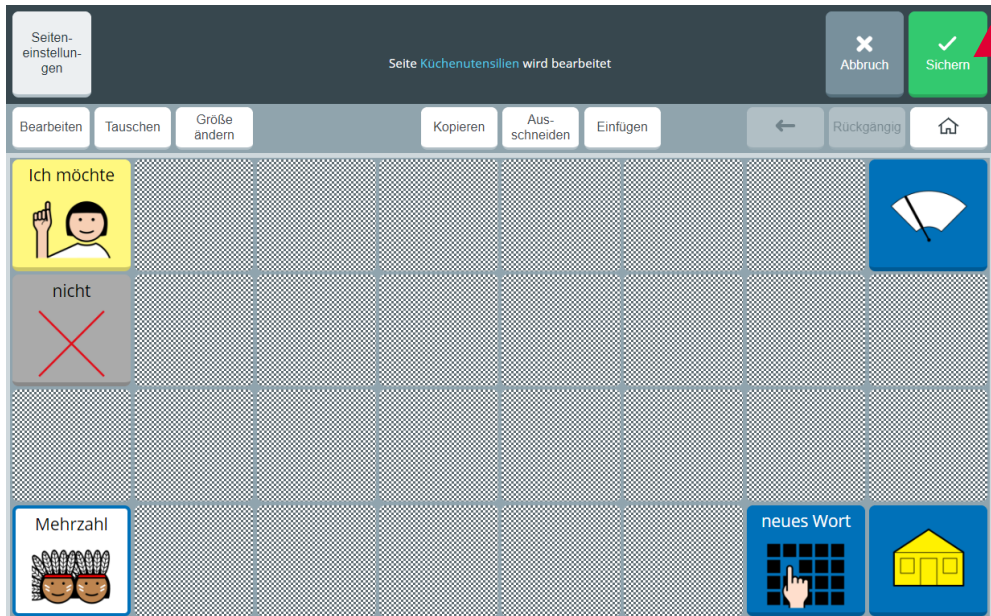

3.5.1. Auf «Sichern» drücken

3.6. Unten rechts auf «Schliessen» drücken (keine Abbildung)

3.7. Oben rechts auf «Toolbox schliessen» drücken (keine Abbildung)



we integrate. active.

4. Taste mit Seite verknüpfen

4.1. Gleicher Vorgang wie Taste erstellen (siehe 2. bis 2.6.6)

4.2. Zusätzlich folgende weiteren Schritte durchführen

Taste bearbeiten

Küchenutensilien

Mitteilung

Farben

Symbol

Navigation

Funktionen

Einstellungen

Taste löschen

Eine Navigationstaste wechselt in einen anderen Bereich / auf eine andere Seite des Vokabulars oder öffnet eine App

Zurück

Start

Toolbox öffnen

Themenleiste anzeigen

Tastatur anzeigen..

Seite anzeigen..

App starten..

Abbruch

Fertig

4.2.1

4.2.2

4.2.1. Auf Navigation drücken

4.2.2. Auf Seite anzeigen drücken



we integrate. active.

4.3. Auf neuer Ansicht die nächsten Schritte durchführen



4.3.1. Auf Navigation drücken

4.3.2. Auf Meine Seiten drücken

4.3.3. Entsprechende Seite auswählen



we integrate. active.

4.4. Auf neuer Ansicht die folgenden Schritte durchführen



4.4.1. Optional «Auf Seite bleiben» aktivieren

4.4.2. Auf Funktion drücken

4.5. In neuer Ansicht abschliessende Schritte durchführen





we integrate. active.

4.5.1. Funktion Mitteilung löschen


4.5.2. Auf Fertig drücken

4.6. Sichern (ohne Abbildung)

5. Aussprache anpassen

5.1. Toolbox öffnen


5.2. Unter Benutzer auf Stimme drücken

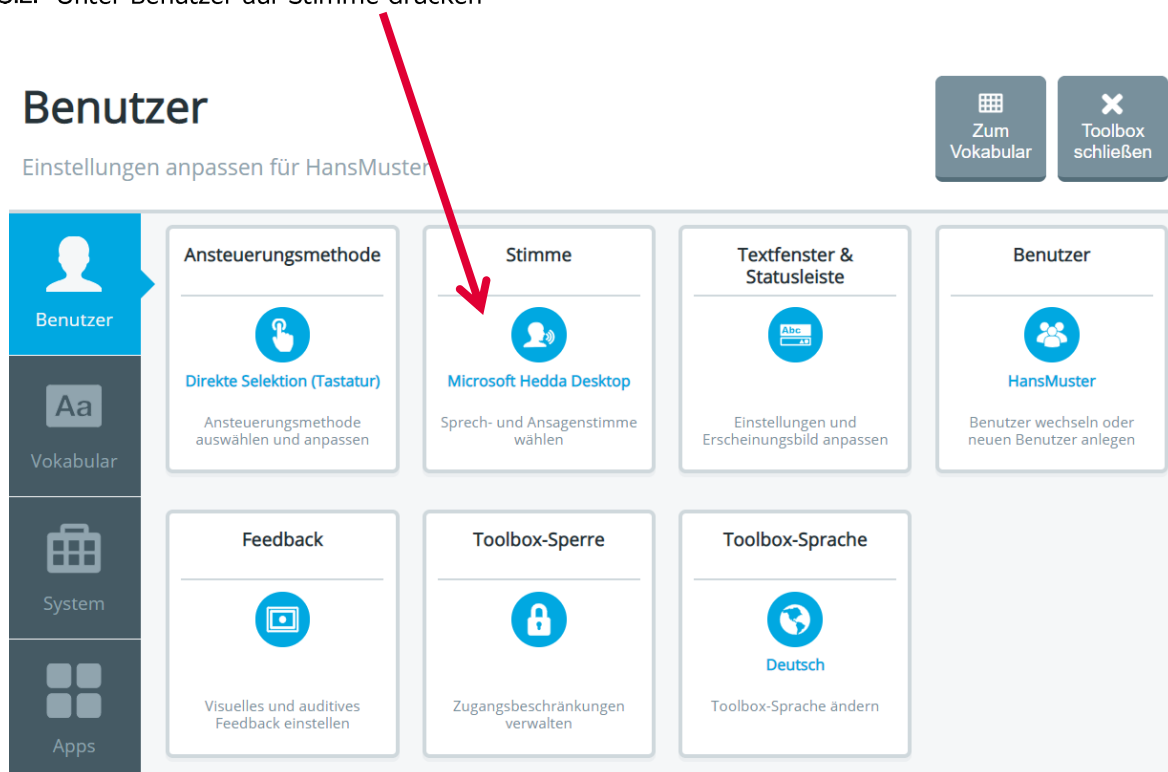




we integrate. active.

5.3. Auf neuer Ansicht unter Sprechstimme auf Aussprache-Lexikon drücken

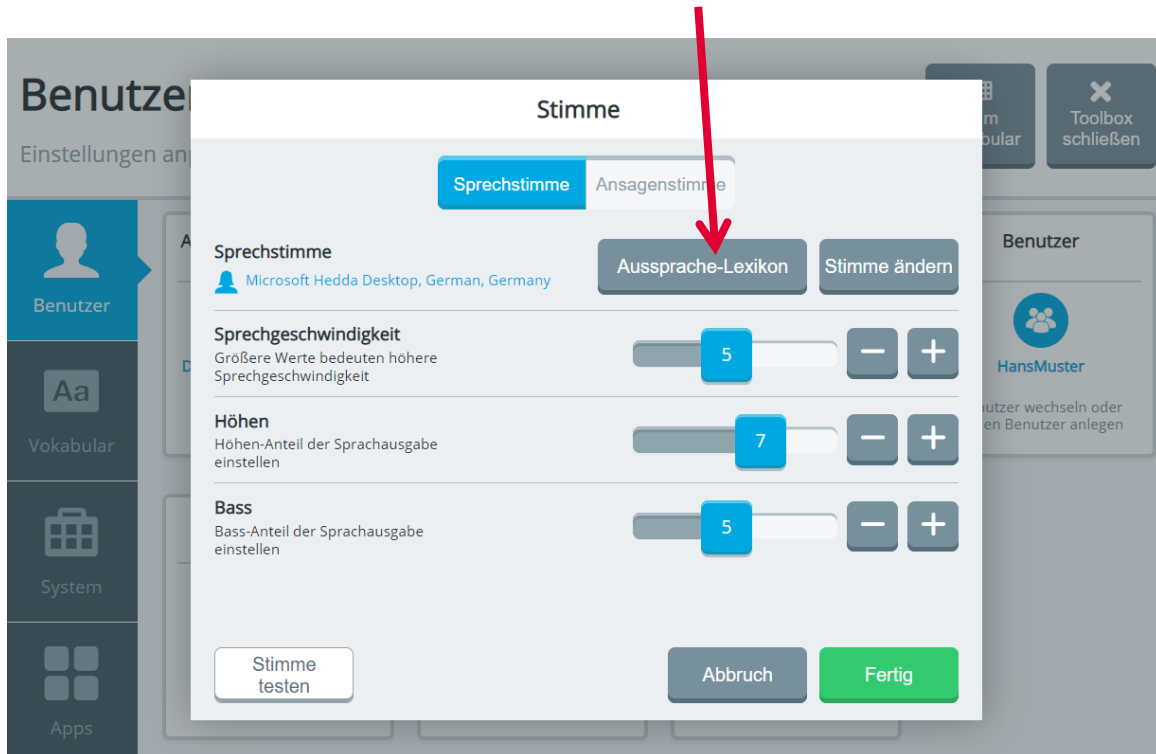

5.4. Auf neuer Ansicht folgende Schritte ausführen

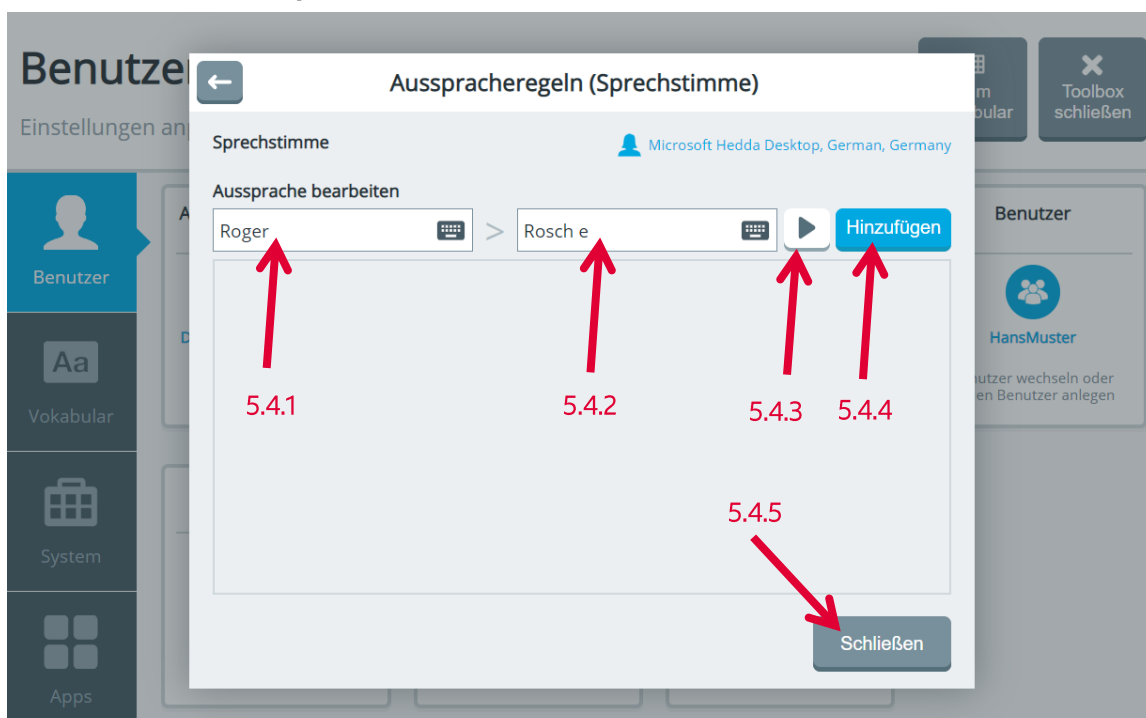



we integrate. active.

- 5.4.1. Wort eingeben und mit «Fertig» bestätigen
- 5.4.2. Aussprache anpassen und mit «Fertig» bestätigen
- 5.4.3. Aussprache testen, ggf. nochmals anpassen
- 5.4.4. Hinzufügen drücken
- 5.4.5. Schliessen drücken
- 5.5. Fertig drücken (ohne Abbildung)
- 5.6. Toolbox schliessen (ohne Abbildung)





we integrate. active.

6. Backup


Das Vokabular muss regelmässig extern abgespeichert werden, damit alle Daten, im Falle eines Defektes, auf ein neues Gerät geladen werden können.

6.1. Speicher-Stick auf der Rückseite des Geräts einsetzen

6.2. Toolbox öffnen

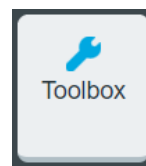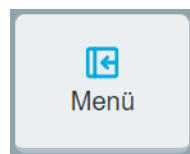

6.3. In der Toolbox folgende Schritte durchführen

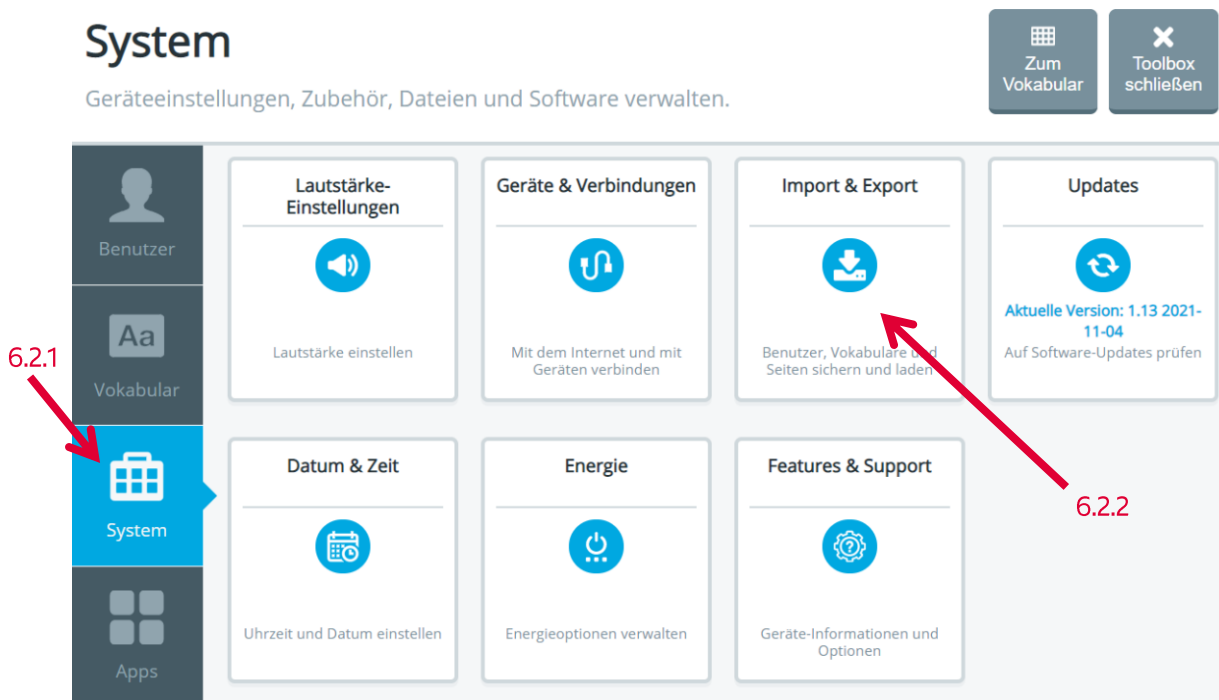


6.3.1. Auf System drücken

6.3.2. Auf Import & Export drücken




we integrate. active.

6.4. Unter Benutzer exportieren, Datei auswählen drücken

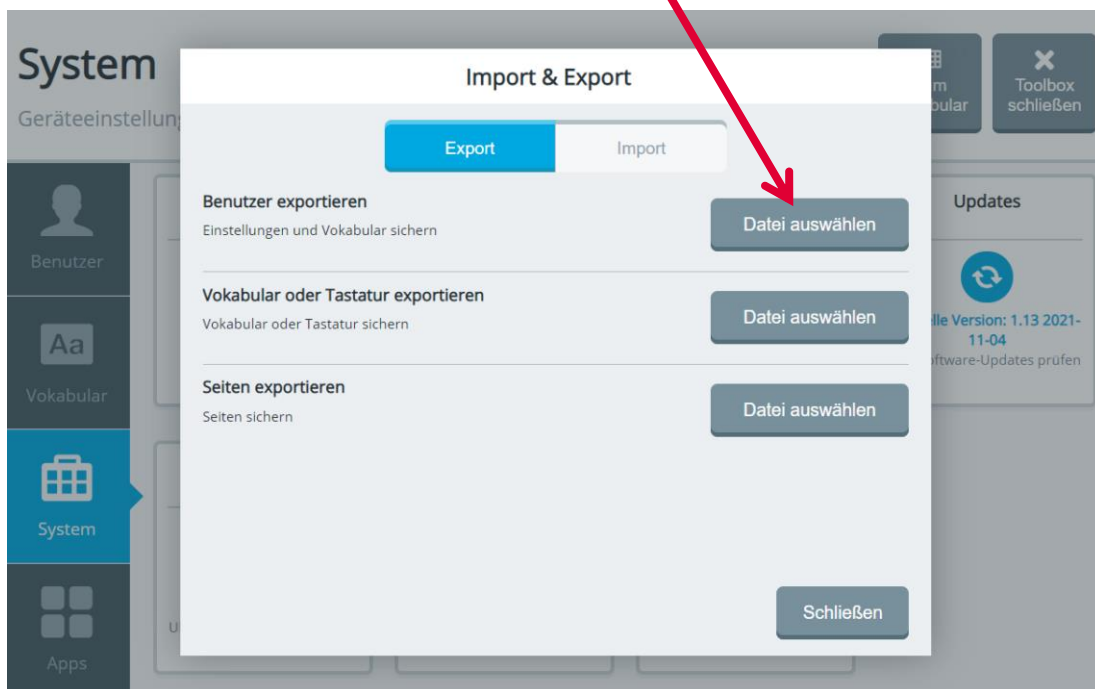


6.5. Beim entsprechenden Benutzer auf Exportieren drücken

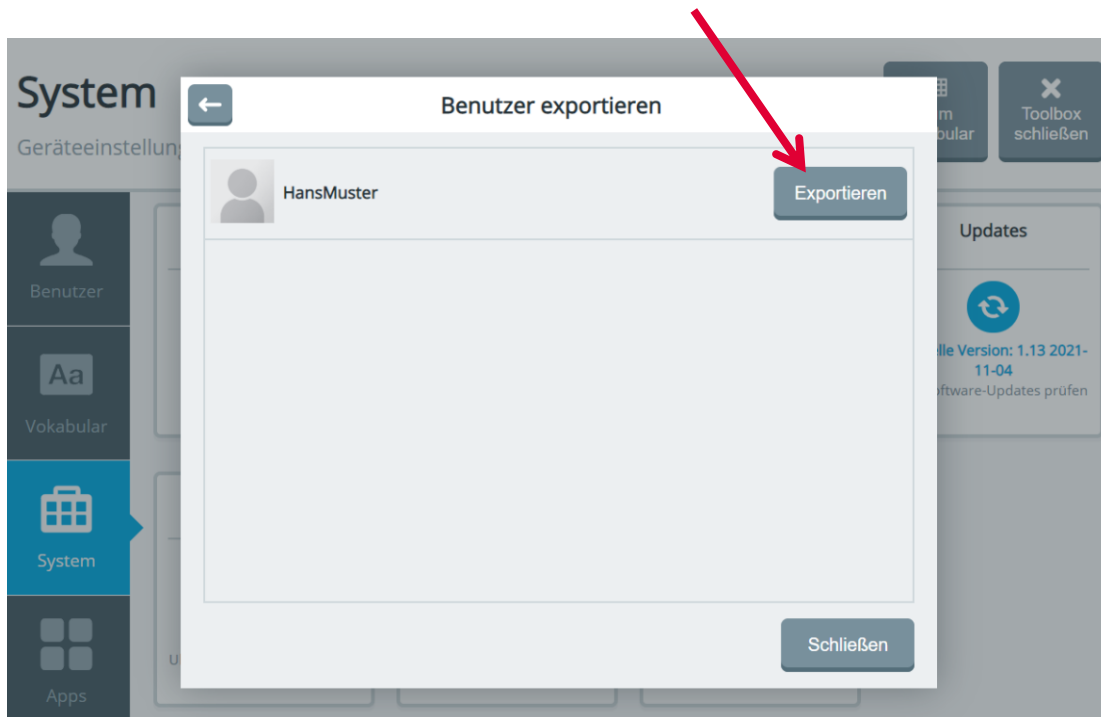



we integrate. active.

6.6. Auf neuer Ansicht die folgenden, abschliessenden Schritte durchführen

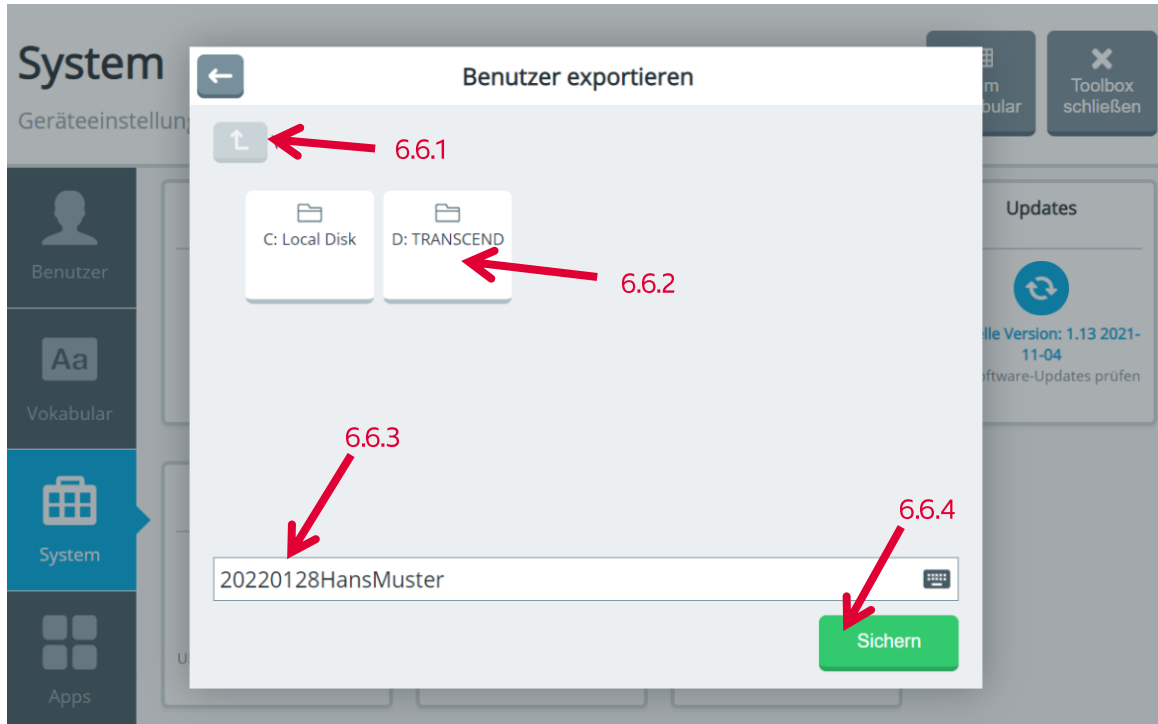

6.6.1. Auswahl Speicherort drücken

6.6.2. Auf entsprechenden Speicherort (Stick) drücken

6.6.3. Name des Benutzers mit aktuellem Datum ergänzen und mit «Fertig» bestätigen

6.6.4. Auf Sichern drücken

6.7. Menü Import & Export schliessen (ohne Abbildung)

6.8. Toolbox schliessen (ohne Abbildung)