



we integrate. active.

Wichtigste Informationen zum Tobii Communicator 5

Link zum Editor/Emulation



Der Communicator 5 kann auf bis zu drei Windows-Geräten gleichzeitig genutzt werden. Hierfür muss der Trail auf der MyTobiiDynavox-Seite innerhalb 30 Tagen lizenziert werden. Die Übertragung des Vokabulars zwischen den Geräten erfolgt per USB-Stick.


<https://www.mytobiidynavox.com/Support/Communicator5>

Softwareupdates

Softwareupdates können direkt auf dem Gerät durchgeführt werden.


ACHTUNG: Mit der Durchführung der Updates sollte mindestens 2-3 Wochen nach deren Erscheinen zugewartet werden.

Kurzanleitung zum Ausdrucken von Text mit Piktogrammen

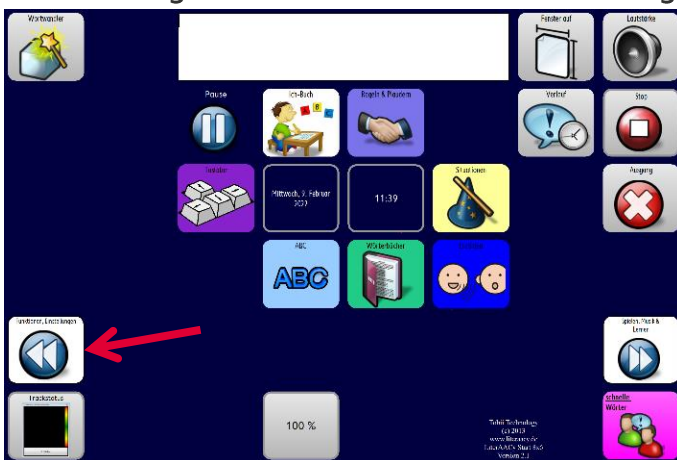

Inhalte aus dem Mitteilungsfenster können leicht und unkompliziert ausgedruckt werden, so dass sie beispielsweise als Brief verschickt werden können.

Hierfür das linke Menü «Funktionen, Einstellungen» öffnen.

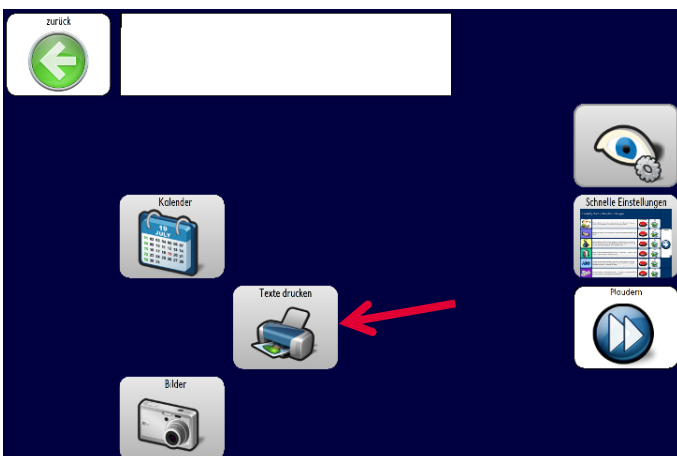

Über die Taste «Texte drucken» gelangen Sie in den Druckerbereich.

wichtig: Hier kann kein Drucker eingestellt werden, das Programm wählt automatisch den zuletzt verwendeten Drucker aus.

Es kann auch eine PDF-Datei erstellt werden. Diese kann dann via Mail verschickt oder auf einen USB-Stick verschoben werden.



we integrate. active.

Herstellerinfo

Link zu der Tauschbörse



Auf Pageset Central befinden sich Seitensets zu verschiedensten Themen, welche frei heruntergeladen werden können.

<https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>

Link zu den Videos und Online-Schulungen



Auf der Internetseite von Tobii Dynavox finden sich Videoanleitungen zur Kommunikationssoftware Communicator 5.

<https://de.tobiidynavox.com/blogs/videothek>



Auf der Internetseite von Tobii Dynavox ist zudem ein Zugang zu Live-Schulungen durch Tobii Dynavox zu finden.

<https://de.tobiidynavox.com/blogs/offentliche-veranstaltungen>